

ジーテス
G-TES[®]
専用カート

取扱説明書



株式会社 **ホ-マ-イオン**研究所

東京都渋谷区神泉町17番2号

お客様相談室  オハヨーニサンキュー 0120-084239

※商品改良のため予告なく一部仕様を変更することがありますのでご了承ください。



HOMER ION

概要および使用目的

G-TES専用カートは、当社指定の低周波治療器 G-TES(ジーテス)を載せるための専用カートです。指定された用途以外の使用及び改造はしないでください。事故の原因となります。

構成


- G-TES専用カート 1台

付属品

- 接続コードガイドアーム 1本
- 本体取り付け用ネジ(取付済) 1本
- アーム固定用ネジ 1本
- 六角レンチ 2本(大・小)
- ケーブルバンド 2本
- 取扱説明書

仕様

- 寸法 幅500±5 × 奥行538±5 × 高さ840±5[mm]
(接続コードガイドアーム除く)
- 質量 約15[kg]
(接続コードガイドアーム含む)

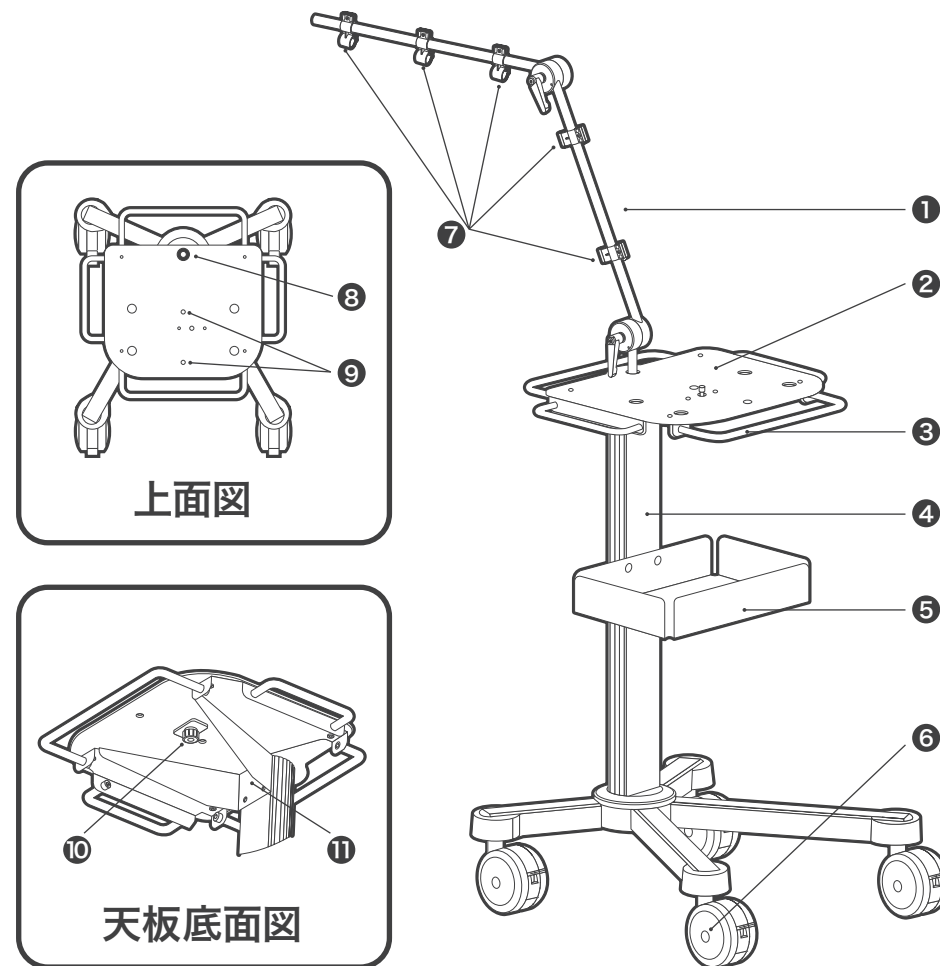


- | | | |
|---------------|------------------|---------------|
| ① 接続コードガイドアーム | ⑤ トレイ | ⑨ 位置決め用穴(2箇所) |
| ② 天板 | ⑥ キャスター(ストッパー付き) | ⑩ 本体取り付け用ネジ |
| ③ 取っ手 | ⑦ コードガイド | ⑪ アーム固定用ネジ穴 |
| ④ 支柱 | ⑧ アームホルダ | |


本体・アームの取り付け方法

1 本体の取り付け方法

- ① 本体位置決め用突部(2箇所)をカートの天板にある本体位置決め用穴(2箇所)に合わせて、置いてください。

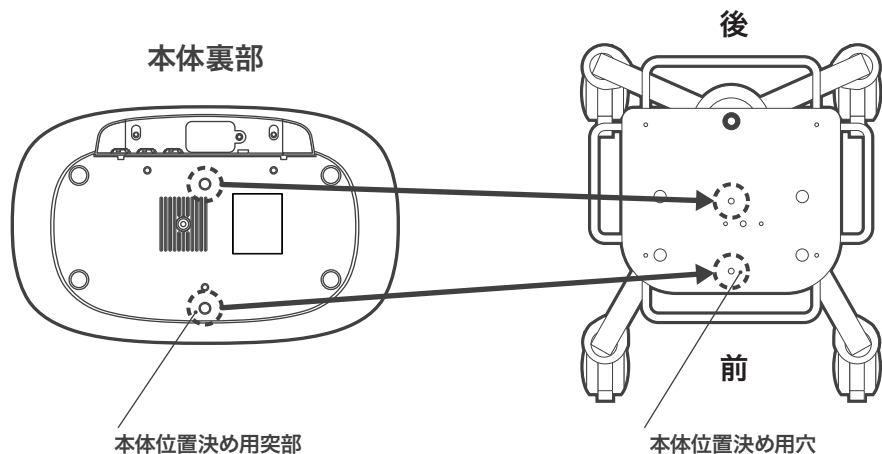


- ② 天板裏の本体取り付け用ネジを本体裏面のカート用ネジ穴に回して固定します。

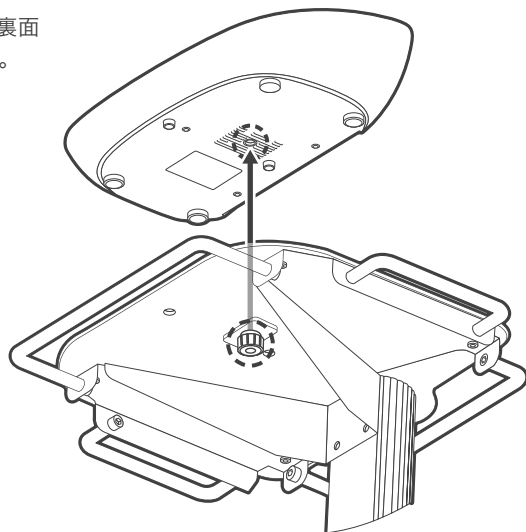

2 接続コードガイドアームの取り付け方法


- ① カート天板のアームホルダに差し込みます。

※ コードガイドのアームへの取り付けが緩いなど、固定を調整する場合は接続コードガイドアーム付属の六角レンチ(小)を使用してください。

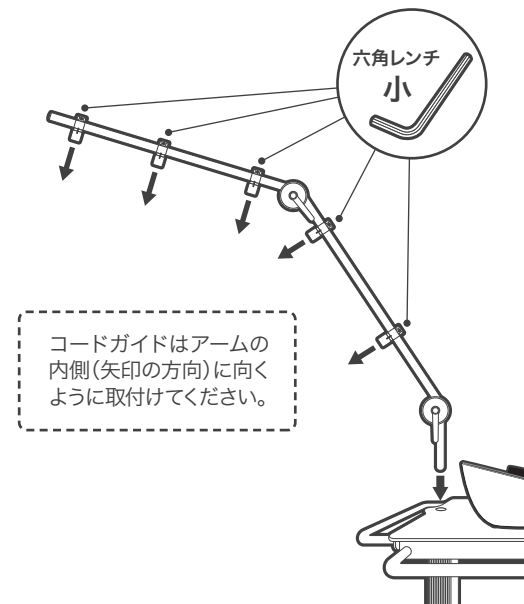


コードガイドはアームの内側(矢印の方向)に向くように取付けてください。

- ② 付属のアーム固定用ネジで固定します。アーム固定用ネジ穴に六角レンチ(大)で締めます。

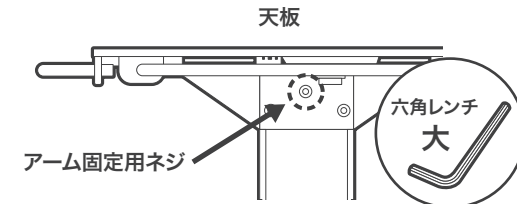

- ③ ベルト電極用接続コードを、コードガイドに通してください。右図のように、接続コードとガイドアームをケーブルバンドで2カ所固定してください。


コード及び本体の破損を防ぐため、コードガイドをアームの内側に向けて取付け、接続コードがアームの内側になるようにコードガイドに通してください。

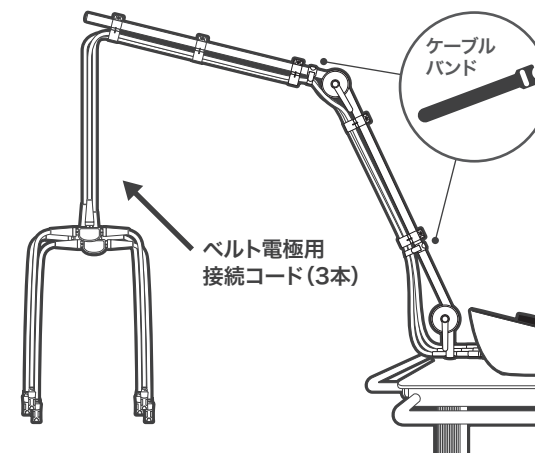


G-TES専用カートの使用法

1 移動方法

- ① 移動させる前に接続コードガイドアームを取り外し、コンセントから電源コードを抜いてください。
- ② キャスターがロックされていないことを確認してから、ゆっくり移動させてください。



△ 注意	
	<ul style="list-style-type: none">• 転倒の原因となりますので、製品のコード類が移動の際に引っかからないように処理した状態でカートを移動してください。• コード類やベルト電極は、取っ手に掛ける事もできます。

- ③ 移動後は、4箇所のキャスターをロックし、安定した状態で本体の操作を行ってください。

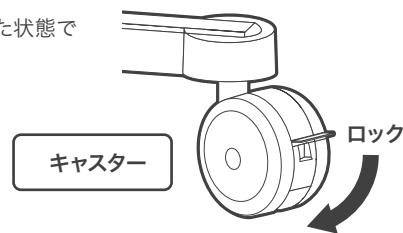

2 角度調整方法

- ① 2箇所のレバーを動かすことにより角度が調整できます。角度を調整する場合は、必ずレバーを緩めてから行ってください。故障の原因となります。
- ② レバーの動かし方

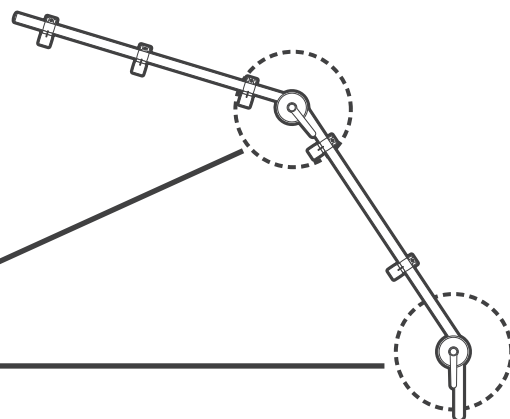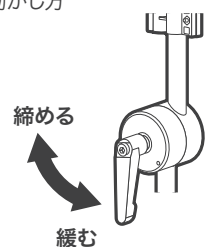

● 本体の取り外し方法

天板の裏から本体取り付け用ネジを緩めて、本体を上を持ち上げながら取り外してください。

● 接続コードガイドアームの取り外し方法

- ① 天板下のアーム固定用ネジを緩めます。
- ② 接続コードガイドアームを上を引き抜いて、取り外します。

● 接続コードガイドアームの折り畳み方法

- ① レバーを緩む方向に約3回まわすと、接続コードガイドアーム可動部分に隙間ができて、アームのロック機構が外れます。(図1)
- ② ロック機構が外れることで、収納時などに接続コードガイドアームを折り畳むことが可能です。(図2)

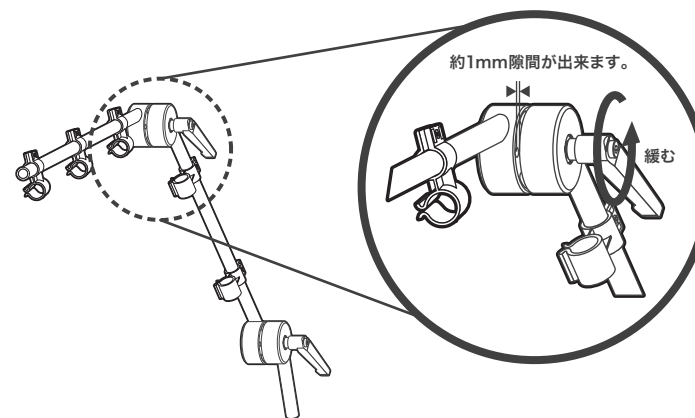


図1



図2