



## 警告

- \* 浴そう台と浴槽の底にヌメリや汚れが付着したままで使用しないで下さい。滑って転倒・けがの原因になります。
- \* 天面の端に足を置かないで下さい。本体が傾き転倒・けがの原因になります。
- \* 石けん等ついた足で浴そう台に上がらないで下さい。転倒・けがの原因になります。
- \* 浴そう台に対して横方向に強く力を加えないで下さい。転倒・けがの原因になります。
- \* 小石状のタイルが埋め込まれた洗い場では使用しないで下さい。転倒・けがの原因になります。
- \* 天面の塩化ビニール素材に対してアレルギーのある方は使用を中止して下さい。  
(必要に応じて塩ビカバーの上に敷く使い捨てカバーを用意しています)
- \* 洗い場床での使用は石鹼等により滑りやすいので身体の安定を保ちながら片足ずつゆっくり浴そう台に上がって下さい。
- \* 底部が水平でなかったり排水溝など不安定な場所には設置しないで下さい。



## 注意

- \* 使用者が自らの身体を十分に安定させられない場合には介助者が付き添って下さい。  
転倒・けがの原因になります。
- \* 沸き出し口に近い位置や60℃以上の高温状態で設置しないで下さい。  
追い焚き給湯器やお湯が循環する浴槽の場合は湯沸しが完了してから設置して下さい。
- \* 使用後は浴槽から取り出して下さい。

## メンテナンス

湯ぶねでの使用においてクッション部分は徐々に変色しますが機能は損ないません。  
高温多湿での使用となりカビの発生を100%防ぐ事は困難です。こまめなメンテナンスが必要です。

- \* 商品開封後、最初の使用前には必ず湯洗いして下さい。(付着物の除去を行ないます)
- \* 使用後天面クッションはシャワーで洗い流して下さい。(アカ等の付着を防ぎます)
- \* 天面スプリング構造体の洗浄は、本体から外した後、市販の「防かび・除菌のスプレー式浴室用洗剤」を散布し、手の平で押し洗いして下さい。足での踏み洗いも効果的ですが、転倒には十分気を付けて下さい。(指先で洗うと引っ掛かりほつれの原因となります)  
全体が泡状になれば10分程度置いてからシャワー等でよく洗って下さい。
- \* 直接お尻が乗るカバーは皮膚の脂肪等でカビが生えやすいので毎日の洗浄をお勧めします。スプレー式浴室用洗剤が効果的です。洗濯機でも洗えます。
- \* 天面クッションを本体の台から外す場合留ピン部分をやさしく引っ張って外して下さい。  
クッション部分に付いた留ピンは外さず使用して下さい。
- \* 使用後は風通しのよい所に立て掛けて水を切って下さい。日蔭の外が効果的です