

# ジェルトロン マルチクッション 取扱説明書・保証書

## 安全のために必ずお読み下さい

絵表示について この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただくために下記の絵表示をしています。  
その表示と意味は次のようにになっています。

注意	禁止	強制指示
この表示は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。	この表示は禁止の行為であることを告げるものです。	この表示は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

ひび割れ等の破損が発生することがありますので、ジェルトロンマルチクッションを変形させた状態のままで長時間の使用や保管をしないでください。	
ジェルトロンマルチクッションの上で立ち上がったり、歩いたり、飛び跳ねたりしないでください。	
ジェルトロンマルチクッションの上で喫煙およびハサミ、ナイフ等の突起物のご使用はお止めください。 殺虫剤・シンナー・ベンジン等の化学物質を使用しないでください。	
40°C以上の高温多湿な場所、直射日光のある場所は避けて、風通しの良い、平らな場所で使用してください。	
移動する場合は、直接カバーを引っ張らないで、ジェルトロンマルチクッションの底面を持って移動してください。また、頻繁に折りたたみをしないでください。	
紙製品・皮革製品・ビニール製品等にジェル部分が触れていると、ミネラロイルが浸透したり色移りする場合がございますので注意してください。また直接ジェルの上を歩いたり触れたりすると、ミネラロイルが付着しやすくなりますので注意してください。	
連続で長時間の荷重をかけ続けると、稀に変形する場合があります。 目安として一日に一度以上は荷重がかからないようにしていただくことをお勧めします。	

## 洗浄について

汚れた部分を洗剤などにて予備処理した後水洗いしてください。洗浄の温度は40°C以下、洗浄後残った水分をタオル等でふき取り、乾燥を行なってください。

## 乾燥について

乾燥温度は50°C以下で、折ったり曲げたりせず平らな状態で乾燥させてください。  
(セグメントを曲げたり、折ったり、吊り下げたり、高温で乾燥された場合、ジェルが変形、割れ、破損する恐れがあります)

## 消毒について

以下の方法にて消毒が可能です。  
・次亜塩素酸ナトリウム消毒 ・オゾンガス消毒 ・アルコール消毒 ・ヒビテン消毒(クロルヘキシジン消毒)  
・二酸化塩素消毒 ・MRガス消毒 ・電解生成水消毒  
※ 消毒の際は必ず平らな状態で行ってください。  
(セグメントに負荷がかかった状態のまま消毒するとジェルが変形、割れ、破損する恐れがあります)  
※ 熱風・熱湯消毒は出来ません。

## 使用・保管方法

カバーを外してのご使用はお止めください。  
直射日光の当たる場所や高温な場所を避け平らな状態で使用・保管してください。ジェルトロンマルチクッションを曲げたり、折ったり、吊り下げたりして負担がかかったまま長時間経過しますと変形やひび割れが発生する恐れがありますので、ご使用中でも1日1回を目安として中身セグメントが元の正しい形を保つようにご注意ください。

## カバーの洗浄について

洗濯表示に基づき洗浄してください。目に見えるごみ等を除去した後洗浄してください。  
洗浄、乾燥とも60°C以下にて行ってください。

■ジェルトロン素材の仕上げに、柑橘類の皮から抽出された天然成分を使用する場合があるため、柑橘系の香りがする場合がございます。  
ご使用に問題はございませんので安心してご使用ください。

## アフターサービス

修理をご依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、再度ご点検の上、なお異常がある場合はお買い上げ店又は、弊社までご連絡ください。  
保証内容につきましては、別紙 保証規定をご確認ください。

## ジェルトロン マルチクッション 保証書

お客様	お名前	様	販売店名・住所・電話番号
	ご住所	〒	
	電話番号	SAMPLE	
お買い上げ日	年	月	日

20200401

PACIFIC WAVE

株式会社パシフィックウェーブ

本社 〒624-0823 京都府舞鶴市京田187-1

お問い合わせ TEL 0773-75-8688 FAX 0773-78-9035