

for Best Care

ALCARE

ニーブレース シリーズ Kneebrace Series

ニーブレース Kneebrace

伸展位膝関節支持帯

Extended Position Knee-Joint Immobilizer

ニーブレース・FX Kneebrace-FX

軽度屈曲位膝関節支持帯

Flexed Position Knee-Joint Immobilizer

取扱説明書

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、商品の特性を十分理解してからご使用ください。
- 常に、この取扱説明書はお手元に置き、必要に応じてお読みください。

お客様相談室 ☎ 0120-770-175

(土・日・祝日を除く 午前9:00～午後5:30)

www.alcare.co.jp

取扱上のご注意

廃棄方法

- 本品が医療廃棄物に該当する場合は、適正な処理方法に則り、廃棄してください。
- 本品を廃棄する場合は、各自治体の廃棄区分に従ってください。

保管方法

- 本品を保管する際は、車中など高温になる場所や低温になる場所、暖房器具の熱などが直接あたる場所などには置かないでください。
- 水濡れに注意し、直射日光を避けて、室温で保管してください。

洗濯方法

- 洗濯する前に、必ずステーをステーカーから取り出します。蓋は閉じてください。「ステーの取り出し・挿入方法」を参照してください。
- 本品の面ファスナーは全てとめてください。
- 他のものと一緒に洗濯しないでください。
- 30℃以下の水で中性洗剤を使用し、手洗いしてください。
- 柔軟剤、塩素系漂白剤、洗濯機、乾燥機、アイロン、ドライクリーニングは避けてください。
- 手洗後は陰干ししてください。
- 本品が完全に乾いてから、ステーをステーカーに挿入し、装着使用してください。
- 装着時に濡れた状態で面ファスナーをとめると外れるおそれがあります。

品質表示

本体:ポリウレタン、ポリエステル、綿
バックステー:アルミニウム/バックステーカー:ポリプロピレン
サイドステー:アルミニウム/サイドステーカー:ポリプロピレン
ステーカーカバー蓋(面ファスナー使用):ポリエステル
ベルト(面ファスナー使用):ポリエステル
パッド(背部・側部内蔵):ポリウレタン
コカン:ナイロン


- 面ファスナーは汗や水で濡れた状態で使用しないでください。面ファスナーは濡れた状態でとめると外れるおそれがあります。
- 本品の装着中、面ファスナーとの接触やステーカーからのステーの飛び出しにより手指や皮膚などを傷つけるおそれがありますので、ご注意ください。
- 本品の装着中、本体および各部位の破損や面ファスナーの係合力の低下などが生じた場合は、直ちに使用を中止してください。

注 意

- 本品の調整が必要な場合は、使用者自身による本品の改造・加工は行わず、医療従事者に相談し、指示に従ってください。
- ステーカーからのステーの飛び出しによる接触で衣料品などが破損してしまうおそれがありますので、ステーカーの蓋がしっかりと閉じていることを確認してください。
- 面ファスナーのフックで衣料品などを傷つけるおそれがありますので十分気をつけて装着してください。
- 洗濯機や乾燥機などの使用は、本品が破損するだけでなく、ステーやコカンなどの硬質の素材により洗濯機や乾燥機などが故障するおそれがありますので、使用を避けてください。「洗濯方法」を参照してください。
- 《ニーブレース・FX》は汗などの水濡れや摩擦により色落ちが生じるおそれがあります。衣料品などと一緒に使用する場合は、色移りにご注意ください。

種類と規格

大腿周囲

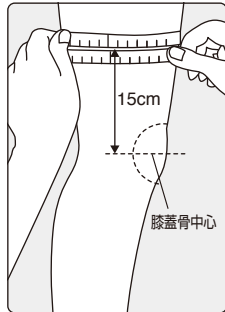

※図のように膝蓋骨中心から15cm上の位置の大腿周囲を測ってください。

※装着脚に腫脹がある場合、健側脚の大腿周囲を参考にサイズをお選びください。

※規格が両方のサイズにまたがる場合は、大きいサイズをお選びください。

ニーブレース

種類	商品コードNo.	規格		1 函入数
		大腿周囲	長さ	
LL	20851	54～61cm	49.5cm	1コ
L	20852	47～54cm	49.5cm	1コ
M	20853	40～47cm	49.5cm	1コ
S	20854	33～40cm	49.5cm	1コ
ショートLL	20861	54～61cm	37.5cm	1コ
ショートL	20862	47～54cm	37.5cm	1コ
ショートM	20863	40～47cm	37.5cm	1コ
ショートS	20864	33～40cm	37.5cm	1コ

ニーブレース・FX

種類	商品コードNo.	規格		1 函入数
		大腿周囲	長さ	
3L	20871	61～68cm	49.5cm	1コ
LL	20872	54～61cm	49.5cm	1コ
L	20873	47～54cm	49.5cm	1コ
M	20874	40～47cm	49.5cm	1コ
S	20875	33～40cm	49.5cm	1コ

ALCARE

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825
www.alcare.co.jp

はじめに

《ニーブレース》《ニーブレース・FX》は、膝関節の支持を目的に開発された商品です。安全にお使いいただくため、用途以外の使用はせず、この取扱説明書に従いご使用ください。商品についてご不明な点は当社お客様相談室までご連絡ください。

ご使用にあたって

本品は一症例一使用となります

- 本品を他の症例、本人以外の方へ使用することはおやめください。

本品は滅菌不可製品となります

- オートクレーブ滅菌、EOG滅菌、プラズマ滅菌など、いずれの滅菌にも対応不可となっております。

本品はMRI時の使用は不可となります

- 本品の部材の一部に金属材料を使用しております。

使用上のご注意

*【使用上のご注意】では、その危険度に応じて次の区分をしております。


⚠ 警告……人身事故につながるおそれのある注意事項

注 意……物損事故につながるおそれのある注意事項

警 告


- 本品の使用に際しては、取扱説明書をよくお読みになったうえ、必ず医師をはじめとした医療従事者は、使用される方へ適正使用のための説明、指導を行ってください。また使用される方は、医療従事者の指示、指導に従って本品を使用してください。
- 本品の使用前に、パッケージに表示された使用期限を確認してください。使用期限を過ぎた本品は使用しないでください。
- 本品の使用前に、本品の破損、変形や縫製のほつれ、面ファスナーの係合力不足などの不具合が無いことを確認してください。不具合がある場合は使用しないでください。
- 本品の使用前に、「品質表示」を参照し、使用している素材に対するアレルギー体質がある方や過敏な方は使用しないでください。また装着部位の皮膚に傷、腫れ、湿疹、炎症などがある場合は医療従事者の指導に従ってください。
- 本品の使用前に、医療従事者は使用者に適したサイズを選定し、使用者の体型に合わせた調整を行ってください。適したサイズを選定しない場合は、適切な製品機能が得られないおそれがあります。
- 本品の装着に際して、医療従事者は装着部位の状態(創傷部、腫脹・熱感、製品との接触部など)や使用者の身体状態(麻酔下、麻酔直後、就寝時など)に応じて、必要な装着管理を行ってください。また使用者に対し、使用状況(就寝時、立位・免荷時など)に応じた装着管理の指導を行ってください。
- 本品の装着中、過度の圧迫や偏ったあたり、締め付けすぎなどに注意してください。装着時に痛み、しびれ(神経障害)、血行障害、皮膚障害などの異常が生じた場合は直ちに使用を中止し、医療従事者に連絡してください。
- 本品の装着中、ずれやゆるみが生じた場合は、正しく装着し直してください。ずれやゆるみがあると本品の正しい機能が得られない可能性があります。

各部の名称

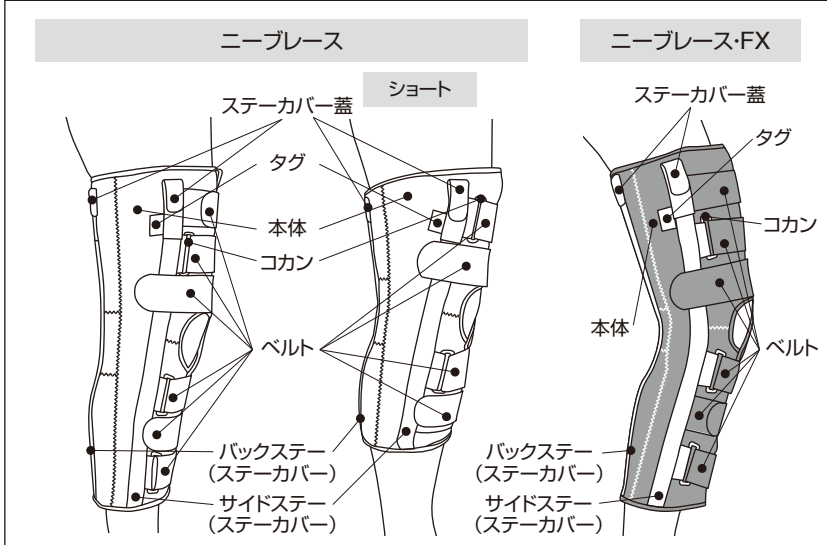

製品仕様およびデザインは、品質改良にともない変更する場合がございます。それにより、イラストと実際の製品とで若干の違いが生じる場合がございますことをご了承ください。

装着図 ※本品は左右兼用です。イラストは「右脚」装着の図です。

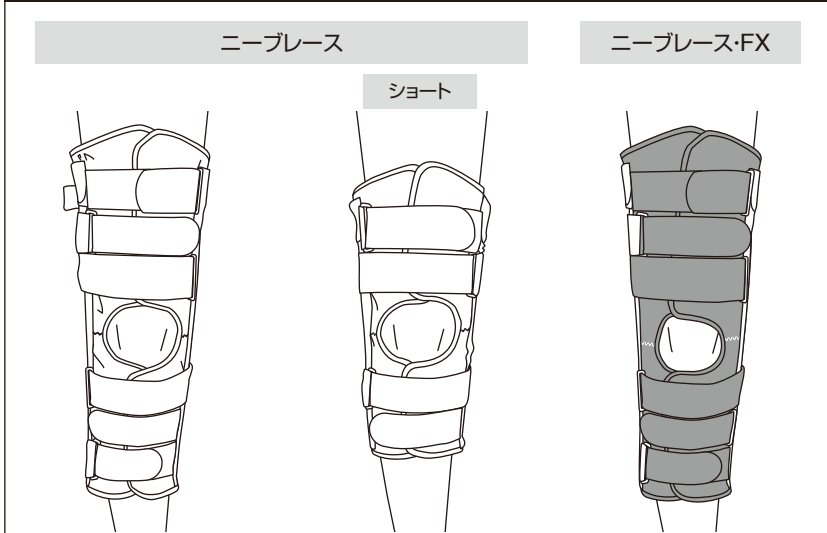

使用手順

【装着の前に】


※本体の上下を確認してください。表側に付いているタグが上方(大腿側)になります。

※ステーがステッカーから飛び出していないこと、蓋がしっかり閉じていることを確認してください。


※汗などにより装着感が気になる場合は、必要に応じて、装着前にタオルなどを本体と脚の間に入れてください。

※本品は左右兼用です。イラストは「右脚」装着の図です。


① 全てのベルトの面ファスナーを外し、パイル生地(本体裏)の面を上にして、本体を広げます。

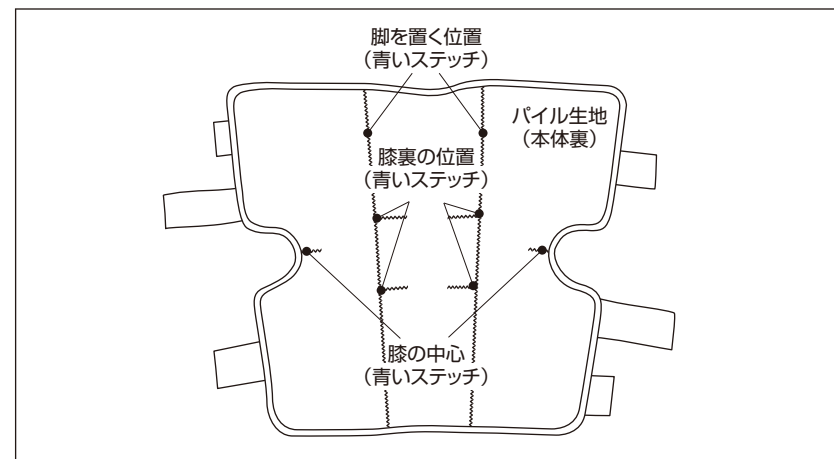

② 膝の裏側から本体をあてます(椅子に座れる場合は、浅く腰掛けて本体をあてます)。パイル生地の青いステッチを目印に、膝の中心(膝蓋骨)、膝裏、脚を置く位置を確認します。

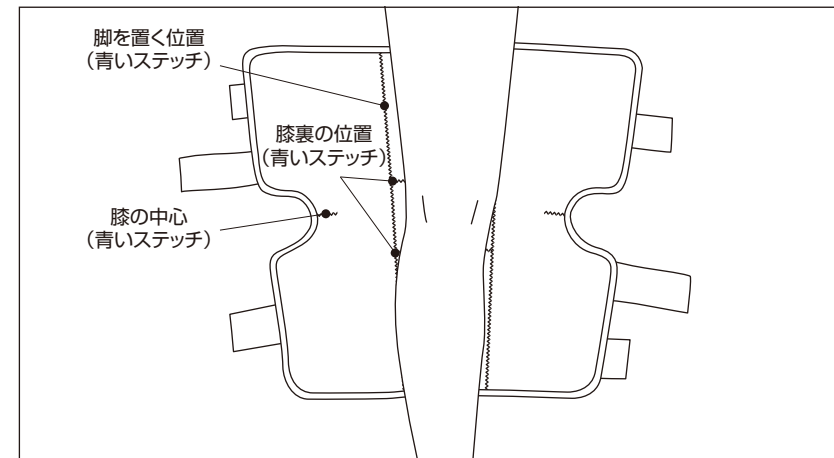


③ 膝の中心が本体の開いている部分にくるように、本体を正面で合わせます。

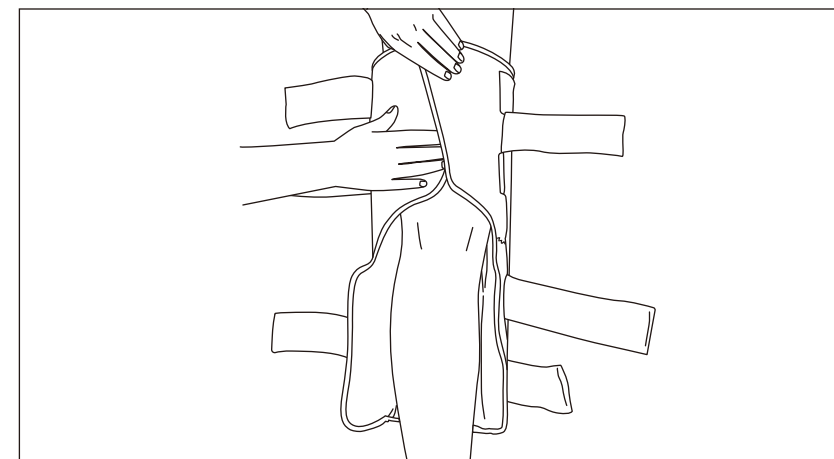


④ ベルトの面ファスナーを図の数字順にコカンに通し、折り返します。

※装着位置が正しいこと、局所的な過度の圧迫や食い込み、あたりがないことを確認します。
※ベルトの面ファスナーは締め付けすぎたり、ゆるすぎたりしないように調整した後、しっかりとめてください。

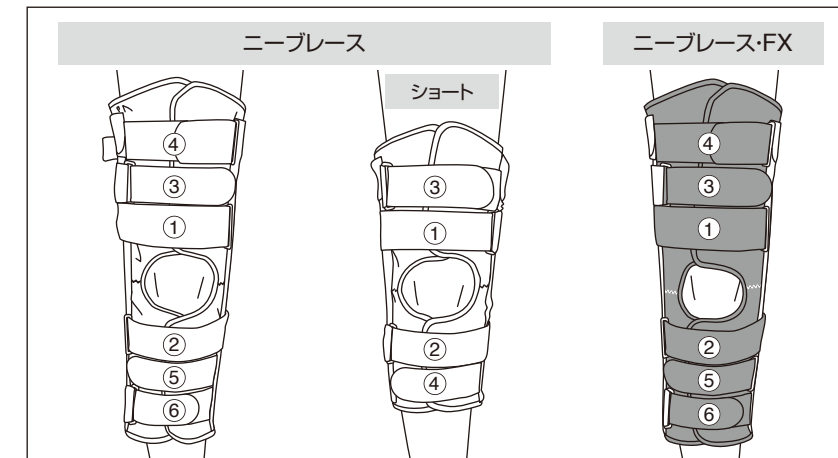

ステーの取り出し・挿入方法

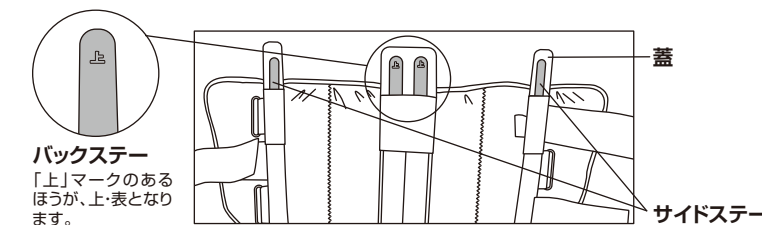

- 本品のステッカーには、バックステー(背面2カ所・各1本)とサイドステー(側面各1カ所・各1本)が内蔵されています。
- 洗濯前にはステーを取り出し、洗濯後にはステーをステッカー内に挿入します。
- ステッカーの蓋を外し、ステーを取り出してください(上端は折り返しにより飛び出さない構造になっています)。
- 洗濯後の再使用時には必ず全てのステーをステッカーの奥まで入れ、上端の折り返しまで確実に戻した後、ステッカーの蓋を閉め、装着を行ってください。
- バックステーには上下・表裏があります。必ず図に従って挿入してください(刻印の「上」マークのあるほうが、上・表となります)。
- 《ニーブレース・FX》のサイドステーは屈曲方向の前後があります。