
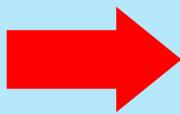


【使用する前に】


- ① 本体は充電が十分でないため、使用を開始する前に充電をしてください。
また付属の「取扱説明書」の充電方法を参照してください。
- ② 本体裏側の**充電口A**に**充電端子B**を合わせると、磁石で固定され、充電が開始されます。

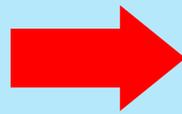

【アプリをダウンロード】

- ① App Store/Google Play ストアで、「hpc」を検索すると、「HPC Smart Cecker」が表示されます。画面の開くを押し、ダウンロードします。
- ② 下記のQRコードをスキャンしても、ダウンロードできます。




*App Store の場合

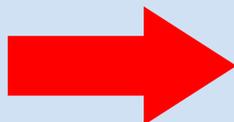

iOS: <https://itunes.apple.com/jp/app/hpc-smartchecker/id1464322477?mt=8>



*Google Play ストア の場合

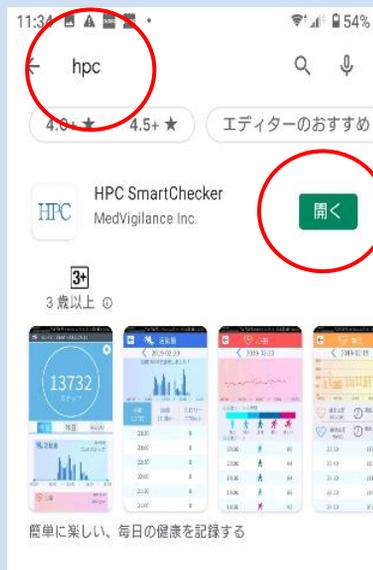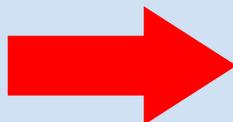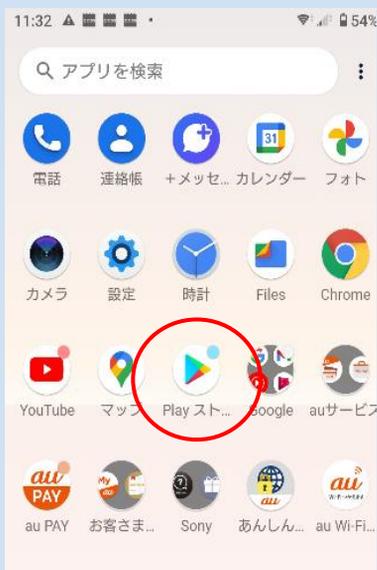


Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.medvigilance.lanceband_app_hpc



【登録する】

- ①「プライバシーポリシーの確認」画面で承認をタップします。
- ②「新規登録」画面で、氏名・メールアドレス・パスワードを入力し、送信するをタップします。
- ③「初期設定」画面で、性別・生年月日・身長・体重を入力し、送信するをタップします。

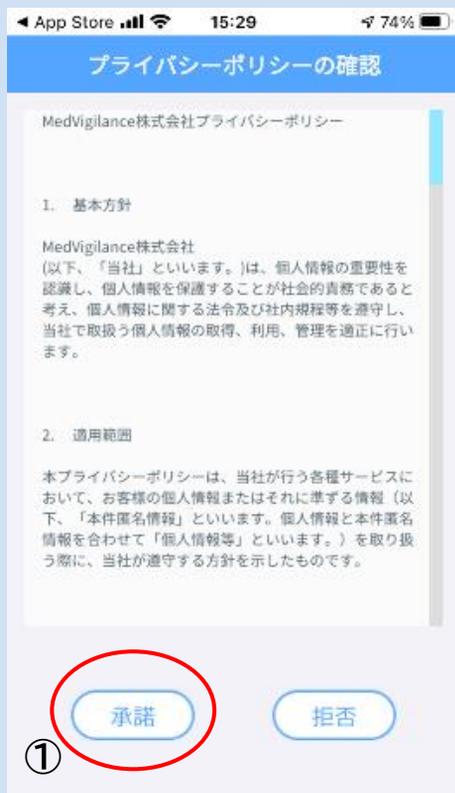

【ペアリングする】

①登録が済むと、時刻が自動で設定され、活動量などを示す画面に変わります。

BluetoothをONにします。

ONになっていることを確認し、ホーム画面右下のプラスボタンを押します。



②接続する「バンドの選択」でSmart Check Band3を選択します。

③本体の右ボタンを押し、時計画面にします。タッチパネルを上から下にスワイプするとマークが表示されます。(詳細)をタッチすると、製品コードが現れます。

④「接続するデバイスを選択」で、本体と同じ製品アドレスをタップします。


マーク下の製品コードとアプリ画面の製品アドレスが合えば、ペアリング 完了です。

※ペアリング(アプリと同期)すると、自動で現在時刻 になります。

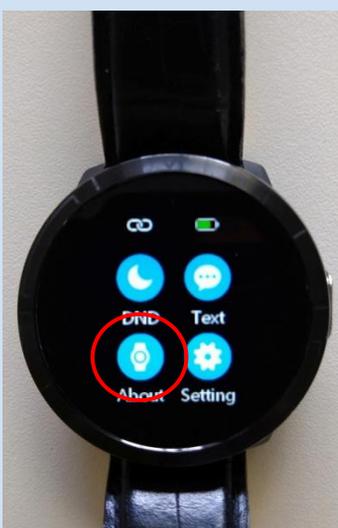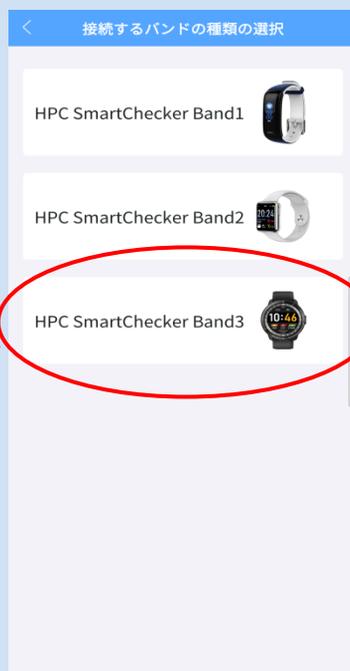




【設定する】

・ホーム画面の**設定マーク**をタップします。「**デバイス設定**」で、各項目を**ON**にすると心拍・血圧・血中酸素濃度・体温の自動計測や警告、通知などが設定できます。

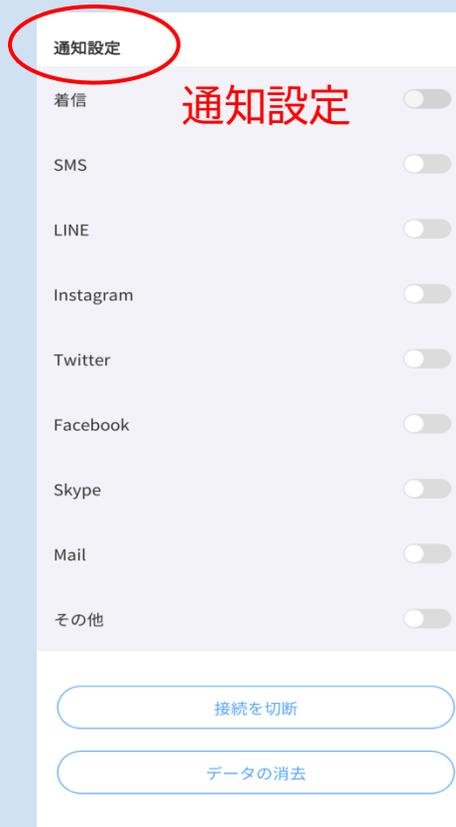

【ストレスを測定する】

- ①ホーム画面の右下の**聴診器マーク**をタップします。
- ②計測時間(60秒・90秒)を設定し、**測定開始ボタン**をタップします。
- ③本体に**ECG画面**が表示されたら、右側の**ボタン**を指で押さえ、電極板を肌に付けます。
- ④測定終了まで動かず安静にします。測定が終わると、計測結果が表示されます。

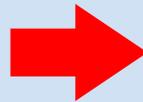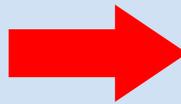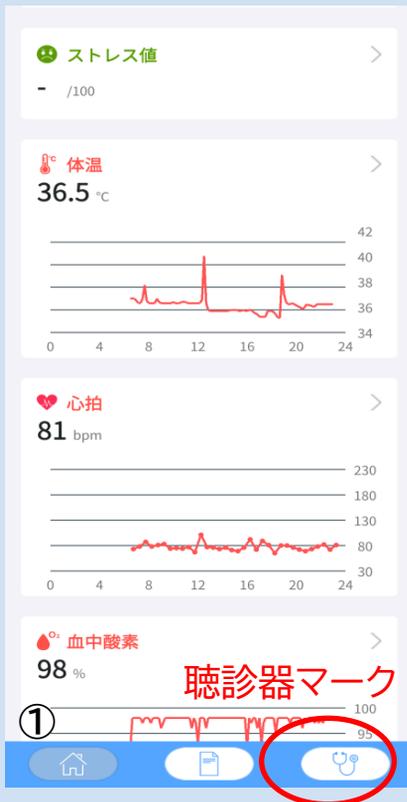

【体組成計を接続する】

- ①ホーム画面の**体組成計**の **〇** 部分をタップします。
- ②体組成計をONにして、体組成計画面の**接続**をタップします。
- ③「接続するデバイスを選択」画面にし、**体組成計のSWAN**をタップします。
- ④「計測中」に表示されたら、**体組成計本体**に乗ります。

測定が終了すると**体組成計の画面**に切り替わり、測定結果が表示されます。

