

## 取扱説明書

製品を安全にご使用いただくために、この取扱説明書よくお読みになり、お読みいただいた後はお手元に保管してください。

 <b>危険</b>	取り扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、死亡または重症を受ける可能性が想定される内容を示しています。
 <b>注意</b>	取り扱いを誤った場合に、人が怪我を負ったり財産に損害を受ける恐れがある内容を示しています。

### 安全上のご注意

#### 危険

- 火気や火花が出る器具の近くには取り付けしないでください。変形や火災の原因になります。
- 火のついたローソクやタバコなどの火気、揮発性の引火物などを近づけないでください。変形や火災の原因になります。
- 取扱説明書の取付方法にしたがって取り付けしてください。規格外での取り付けは怪我や事故の原因になります。
- 丈夫で凹凸のない壁面に確実に取り付けてください。取り付け上の不備があると、落下による怪我や破損の原因になります。
- 製品に強い荷重や衝撃を与えたりしないでください。転倒・落下による怪我や破損の原因になります。


#### 注意

- 本製品は個人用防護具（PPE）を収納する製品です。本製品を目的以外の用途では使用しないでください。
- 本製品を使用する前に破損や異常が発生していないか、ご使用前に必ず点検してください。
- 本製品を加工・改造など行わないでください。
- 設置にあたりましては、通行などの妨げにならないように、周囲の状況に十分配慮して設置してください。
- 壁面に取り付けの場合、施工の専門業者に依頼いただき、壁材質を確認後に取り付けてください。
- 本製品は屋内用です。屋外など湿気の高い場所でのご使用はしないでください。

### 【商品仕様】

■外形寸法：W266×D118×H454mm ■内形寸法：W260×D110×H451mm ■材質：ポリ塩化ビニール

### ■外観図

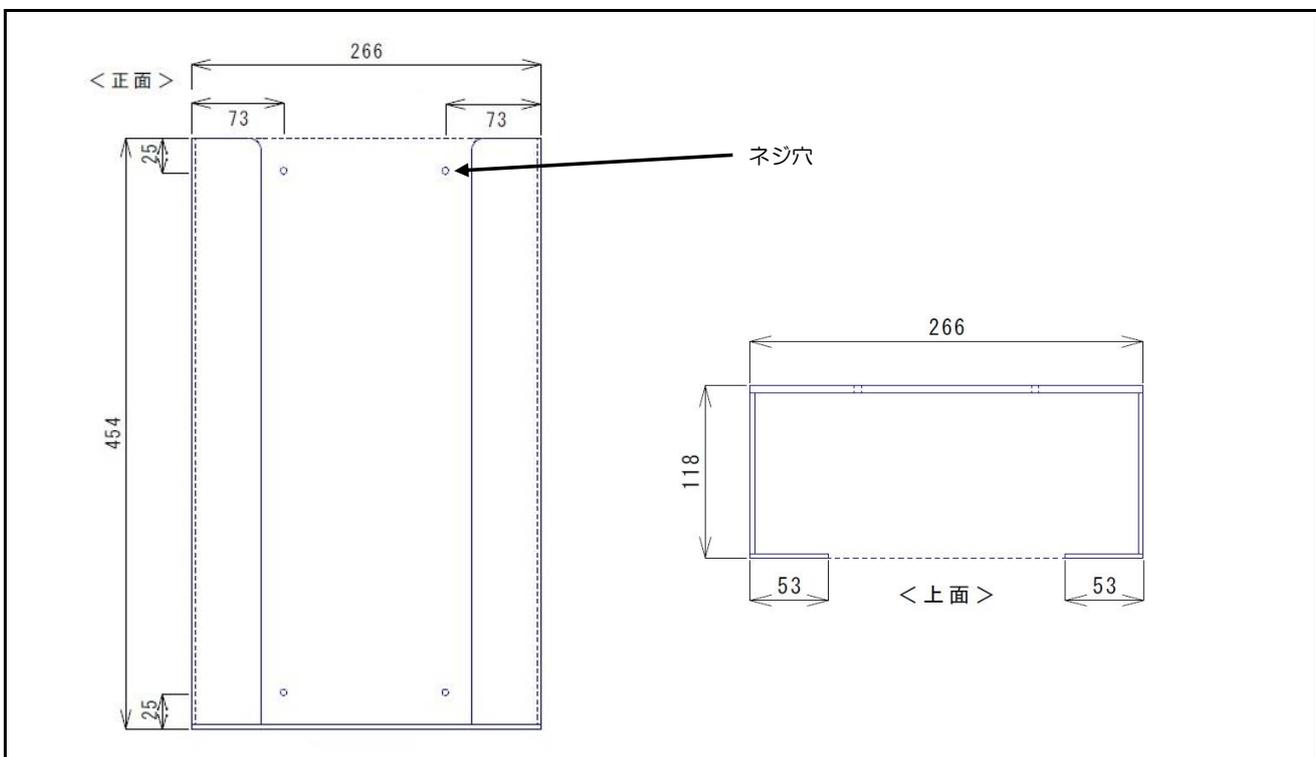

## ■取付方法

《手順》

- (1) 取り付け場所を決めてください。
- (2) 壁面が木製の場合、案内穴をあけてから付属の木ネジで4箇所を固定してください。

※本製品には、木ネジが付属しておりますが、壁面の材質、設置強度によって石膏ボードアンカー、アンカーボルトなどを別途ご用意のうえ、取り付けてください。



- 丈夫で凹凸のない壁面に確実に取り付けてください。  
取り付け上の不備があると、落下による怪我や破損の原因になります。

## ■ご使用方法

- PPE製品の箱の取り出し口を開封し、取り出し口を正面に向けてマツヨシ グローブディスペンサーの上部からゆっくり入れてください。正面が空いているのでPPE製品を簡単に取り出せます。



- 製品の寸寸より大きい箱を入れないでください。破損の原因になります。

## ■お手入れ方法

- 塵・ほこり・汚れは乾いた柔らかい布、化学雑巾でふき取ってください。  
汚れがひどいときは薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭き取り、その後に水で濡らした柔らかい布で拭きとり、最後に乾いた布で乾拭きしてください。



- 60℃以上のお湯は使用しないでください。変形や破損の原因となります

(発売元)

 松吉医科器械株式会社

<https://www.matsuyoshi.co.jp>