

向日葵 LuI-002

まめ型 HOT & COOL パック

取り扱い説明書

【用途】


耳の後ろや産後の胸に。

【使い方】

COOL：冷凍庫で3時間以上冷却した後、
専用カバーに入れてご使用下さい。

HOT：500W 又は 600W の電子レンジで

30 秒間加熱した後、専用カバーに入れてご使用下さい。

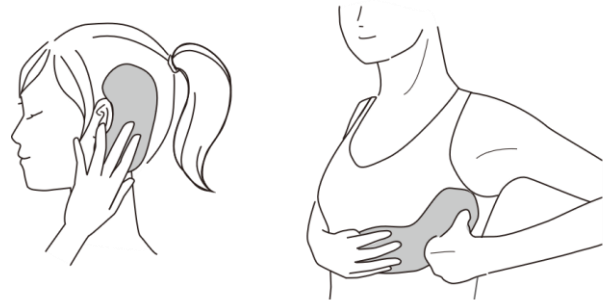

※電子レンジの出力および加熱時間を必ず守り加熱して下さい。

※ジェルを平らに伸してから温めて下さい。ジェルが偏り、薄い部分があると集中的に加熱され、火傷やフィルム破損の原因となります。

※温かさが足りない場合は、よく揉みほぐした後、10秒ずつ追加加熱して下さい。

※オート加熱、おまかせ加熱、オープン機能などは使わないで下さい。

※冷却した状態のジェルを温める際は、一度完全に解凍した後に温めて下さい。部分的に高温になってしまい、火傷やフィルム破損の恐れがあります。

※電子レンジ庫内が連続使用などで熱くなっている場合は、冷めるのを待ってから加熱をして下さい。庫内が熱い状態で加熱を行うと規定時間よりも早く温まってしまい、火傷やフィルム破損の恐れがあります。

※加熱時にジェルが膨れている、または破裂したなどの場合は直ちに電子レンジのスイッチを切り、加熱を中止して下さい。また、電子レンジの扉は絶対に開けないで下さい。その後、十分に冷めてから扉を開け、保護用手袋等をしてジェルを取り出し、廃棄してください。

※電子レンジ庫内の汚れをよく拭き取ってから加熱して下さい。汚れが原因で袋が焦げて破れる恐れがあります。

※加熱したジェルは加熱ムラにより一部が高温になっている可能性があります。ご使用前には良く確認してお使い下さい。

※熱いと感じたら直ちに使用を中止して下さい。そのまま使い続けると火傷・低温火傷の恐れがあります。

※加熱直後は大変熱くなっておりますので保護用手袋等を着用し火傷にご注意下さい。

※加熱時間はジェルの初期温度が20℃前後を想定しております。初期温度が高い場合は加熱時間を短くして下さい。

【サイズ】

約90×185mm, 約120g

【材質】

フィルム：ナイロン、ポリエチレン

内容物：水、プロピレングリコール、調整剤、CMC、防腐剤、色素

専用カバー：綿 100%

ポーチ：EVA

レンジ加熱用カバー：

【注意事項】

- 本品は食べられません。
- 本来の目的以外に使用しないで下さい。
- 冷却又は加熱した本品を直接肌に当てると凍傷や火傷になる恐れがありますので注意して下さい。
- 落としたりぶついたりすると破れる可能性がありますので、乱暴に扱わないで下さい。
- ジェル袋表面をアルコール等の消毒剤や溶剤系の液体で強く擦ると印刷が剥がれてしまう恐れがありますので、ご注意下さい。また、手や顔の脂分等でも同様の事が考えられます。
- 万が一、袋が破れてジェルが漏れた場合は流水で洗い流して下さい。
- 廃棄方法は地区によって異なりますので、各自治体の指示に従って下さい。
- 経時変化によりジェルは徐々に少なくなっていきます。ジェルが少なくなると性能が落ちる他に、指定の加熱時間で温めても異常加熱を起こし、破損や火傷などの危険性が出てきますので、1年間を目安に新しい物にお取り替え下さい。

【製造販売元】

三重化学工業株式会社

〒515-0001 三重県松阪市大町 262-1
TEL 0598-51-2361 FAX 0598-51-1143
URL <http://www.miekagaku.co.jp>