


電池

Popit Sense は、3V の CR2032 リチウム金属コイン電池（付属）で動きます。電池はユーザーが交換できます。有名ブランドが製造する CR2032 または DL2032 型の承認済み電池のみを使用してください。

電池は通常の使用で約 3 ～ 12 か月持続します。電池の寿命は、Popit Sense が 1 日に検出する錠剤の量によって異なります。最長稼働期間は、1 日 1 錠かそれ以下の頻度の投薬した場合です。

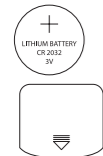

電池の交換

電池ケースをスライドさせて開け、古い電池を取り外します。新しい電池を文字側が上を向くようにし所定位置にスライドさせます。カバーを所定位置にスライドさせて電池ケースを閉じます。ケースが正しく閉じていることを確認してください。

電池を充電したり、分解したり、ショートさせたりしないでください。

電池は、お住まいの地域の規制に従って適切に廃棄してください。

電池を廃棄する際は、+ 面と - 面を絶縁テープや非導電性テープで絶縁してください。リチウム電池は、適切に処分しないとショート、高温化、破裂や発火の恐れがあります。

破損した電池は使用しないでください。電池を火気に近づけないでください。

電池が壊れた場合は素手で触れず、安全ゴーグルを使用してください。

ペットや子供を電池に近づけないでください。電池を飲み込んだ場合は、すぐに緊急電話番号に電話して指示を求めてください。

新品および未使用の電池は乾燥した場所に保管し、温度を -30 ～ 60°C (-22 ～ -140° F) に保ってください。

電池を飛行機に持ち込む場合は、航空会社の安全指示に従ってください。

重要な情報

デバイスサイズ：L45mm x W30mm x H13mm
ケース素材：プラスチック

Popit Sense は電子機器であり、取り扱いには注意が必要です。

故障または損傷しているように見える場合は、Popit Sense を使用しないでください。

周囲温度が 0°C ～ 40°C、湿度が 10% ～ 93% の環境でデバイスを使用してください。

Popit Sense に防水性はないため、常に乾いた状態を保ってください。必要に応じて、湿らせたぬるま湯で拭いてください（デバイスを損傷する可能性があるため、洗剤は使用しないでください）。

高品質のコイン型電池で最大 12 か月の電池寿命に達するためには、すべてのセンサーを常にアクティブにすることはできません。このため、最高の精度を得るには、このユーザーガイドに記載されている使用方法に従うことが重要です。

多種多様な錠剤包装シートが存在し、錠剤の服用に多くの方法が利用可能なため、自動検出は時々不正確になる可能性があります。絶え間ない開発により、これらを最小限に抑えるよう努めております。

廃棄

WEEE：製品およびそのパッケージ上にあるこの記号は、製品が寿命の終わりに通常の家庭ごみとは別に廃棄されなければならないことを示しています

これは、天然資源を保護するためにリサイクルセンターで電子機器を廃棄する、ユーザーの持つ責任です。

欧州連合の各国には、電気および電子機器のリサイクルのための収集センターがあるはずですが、リサイクル製品回収所の詳細については、お住まいの地域の電気電子機器廃棄物管理機関または製品を購入された小売店にお問い合わせください。



保証

Popit Sense には、1 年間の限定保証が付いています。不良品の場合は購入日から 1 年間商品の交換を行います。ユーザーは、RMA (Return Merchandising Authorization) を受け取るために弊社まで連絡する必要があります。この保証は、以下には適用されません。

- (a) 傷やへこみなどの表面的な損傷。
- (b) 事故、誤用、不当な使用、水没、放置、乱用、電池の液漏れ、不適切なサービス、またはその他の外的原因による損傷。
- (c) 付属リーフレットに記載されている Popit Ltd. が許可または意図した使用方法以外で製品を操作したことによって引き起こされた損傷。
- (d) 改造された製品または部品
- (e) 通常の摩耗やその他の原因による製品の通常の経年劣化による欠陥。



こんにちは

Popit をお選び頂きありがとうございます。

Popit Sense と Popit アプリを使用すると、時間どおりにお薬を服用することができます。

Popit Sense と Popit アプリは、利用者が現在行っている服薬管理記録を補正する目的での使用を推奨しています。

適切な時間に服薬し、医療専門家からの指示に従う責任は、利用者に帰属します。

連絡する

Popit 製品に問題が発生した場合は、スタッフがお手伝いします。

www.popit.io
reachout@popit.io

Popit Ltd.
Metsänneidonkuja 6
02130 Espoo
FINLAND

医療援助や処方箋が必要な場合は、医療専門家に連絡してください。



ユーザーマニュアル




1 アプリをインストール




iPhone - App Store
Android - Google Play

Popit アプリを開いて通知を許可し、ガイドに従ってセットアップしてください。

2 各部の名称

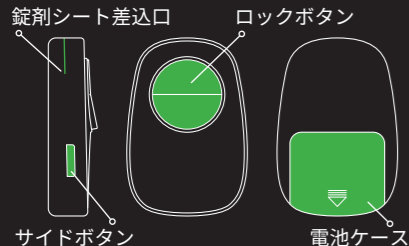

3 錠剤シートの取り付け

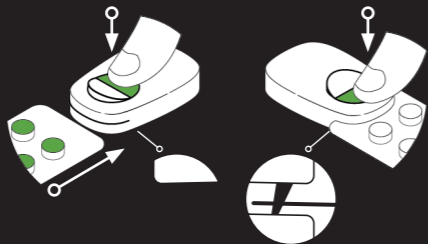

A
ロックボタンの外側を押しながら、錠剤が上になるように錠剤シートを差し込みます。

B
ロックボタンの内側をしっかりと押し、錠剤シートを固定させます。

錠剤シートの交換

手順 A のようにロックボタンを押し続け、錠剤シートを取り外します。手順 A と B を繰り返して、新しいシートを挿入します。

錠剤の管理を滞りなく続けるために、錠剤シートが空になったらすぐに次の錠剤シートと取り替えてください。

4 服用を記録する

Popit Sense には、2種類の服薬記録方法があります。

【自動検出】


3つのセンサーが、お薬が取り出されたかどうかを検出します。

【手動検出】

サイドボタンを短く押し、手動で服薬を記録します。複数のお薬を服用している場合、全てのお薬を服用後に1度のみボタンを押してください。どちらの方法でも電子音が鳴り、服薬が正常に記録されたことを確認できます。

確認音

どちらの検出方法でも、4回のピープ音が鳴り、服薬が正常に記録されたことを確認できます。

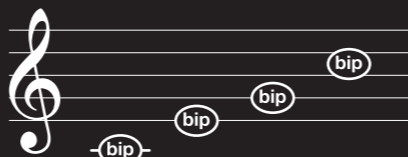

手動検出の仕組み



サイドボタン

Popit Sense のサイドボタンを短く押して手動で服薬を記録します。

複数のお薬を服用している場合、全てのお薬を服用した後で一度押すだけで OK です。Popit アプリで手動で服薬を記録することもできます。



※複数の薬を服用している場合、同時に服用したすべての薬について、確認音は1セットのみ鳴ります。

※服用が誤って登録されてしまった場合、アプリからその服薬を取り消してください。

※Popit Sense をポケットに入れしないでください。センサーがアクティブになる場合があります。

自動検出の仕組み




① 錠剤シートをセットしたデバイスを取り出します。Popit Sense (デバイス) は動きを感知すると自動でセンサーがアクティブになります。

※上手く作動しない場合は…過度の動きを感知すると、電池の節約のためスリープモードに入ります。デバイスを数分間置くか、手動検出を行ってください。



② 片方の手でデバイスのタッチセンサー部を持ち、もう一方の手で錠剤シートを持ってください。タッチが検出されると、確認音が2回鳴ります。その後、数秒以内に錠剤をしっかりと取り出します。

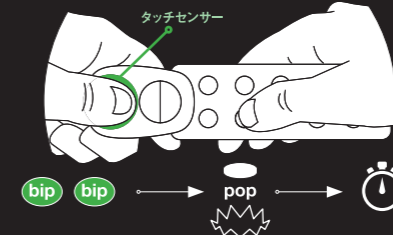

③ デバイスが錠剤の抽出音を自動で検出します。この際、確認音に加えてサイドボタンが点滅します。



点滅していても大丈夫です。手動検出を使用できます。

↓
Popit Smart Pill Reminder のインストールはコチラのQRコードから

Android Google Play iPhone App Store