



部品の名称

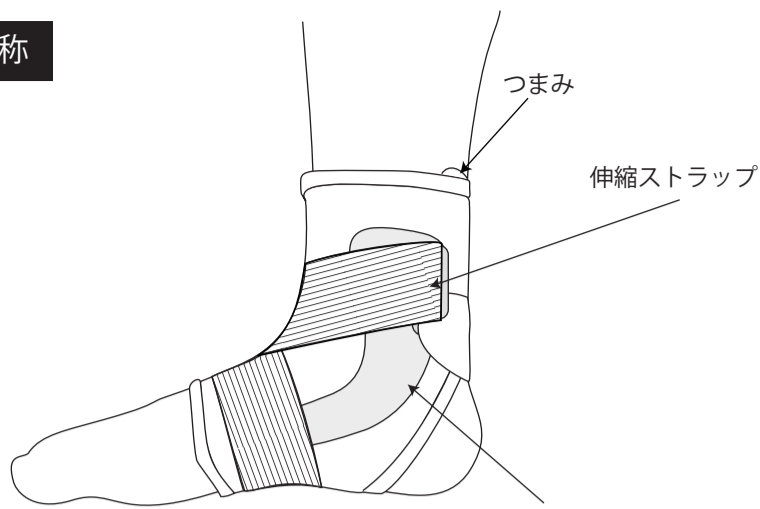

[表面]

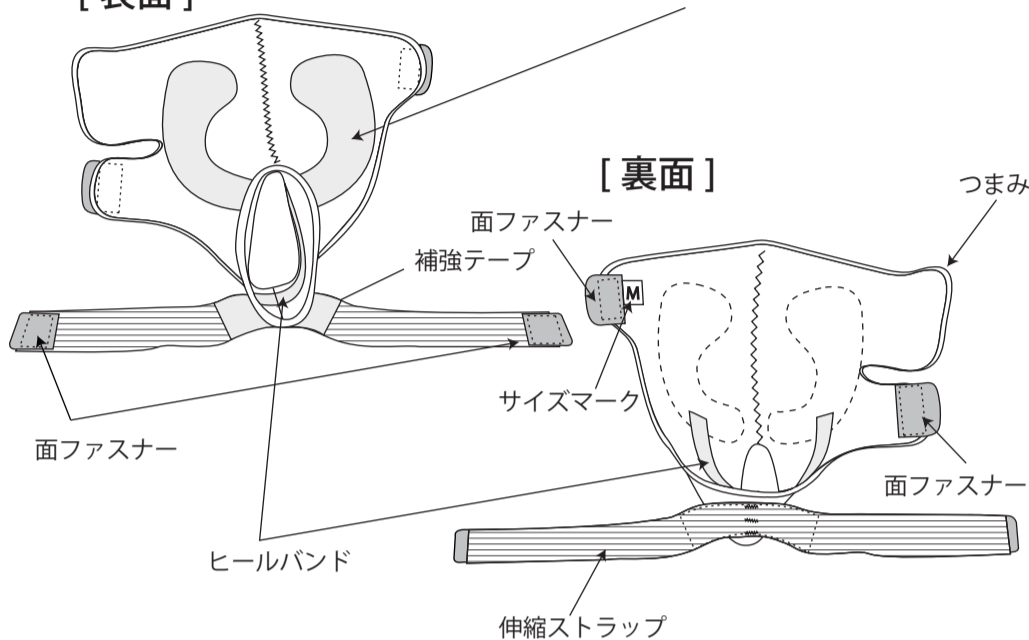

足関節サポーター

アンクルエース
ANKLE A

[装着の注意]

- 医師または医療スタッフの指示に従い装着してください。装着することにより違和感・痛み等を感じましたら直ちに医師にご相談ください。
- 靴を履く際には靴ひもをゆるめ、履き口を広げてください。


その他:

- ◇ 洗濯する場合には、中性洗剤で押し洗いして型を整え陰干ししてください。脱水機・漂白剤・乾燥機のご使用はおやめください。
- ◇ 素材にはナイロン・ポリウレタン・ポリエステル、パーツ類にプラスチックを使用しておりますので、使用後は各地方自治体の廃棄区分にしたがってください。

サポーターの装着方法



日本製

1. 本体の面ファスナーと伸縮ストラップの面ファスナーをすべて外します。



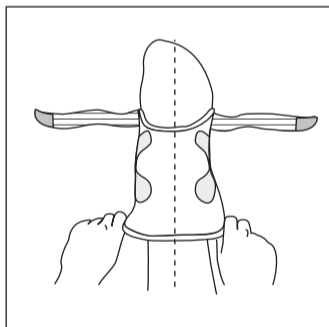


2. 内側に裏面がくるよう本体上部をもち、靴下を履くようにつま先を中心に入れてください。

* 図は右足装着の場合です

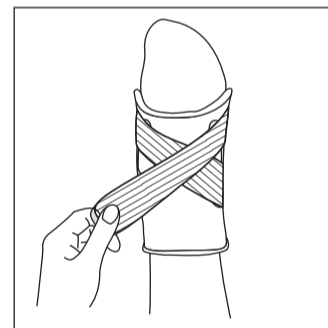
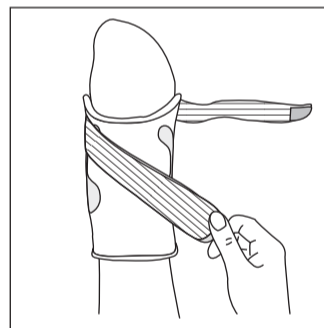


3. 足首を直角にして足の裏全体を床につけます。下部の面ファスナー部を左手に持ち、右手は面ファスナーが無い方を生地を引っ張りながら面ファスナーを本体に止めてください。

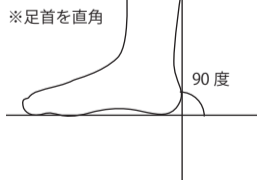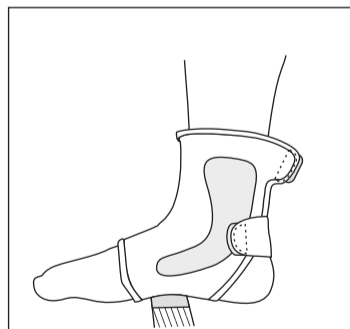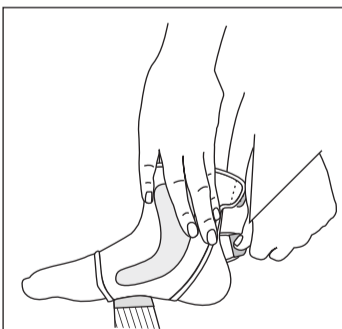

※下部の面ファスナーを止めた図

4. 上部の面ファスナー部と本体つまみ部分を持ち、左側(面ファスナー)が上になるよう交差させ面ファスナーを本体に止めてください。

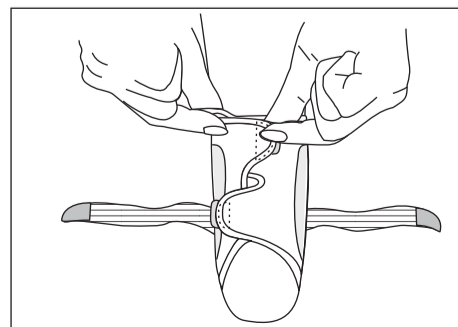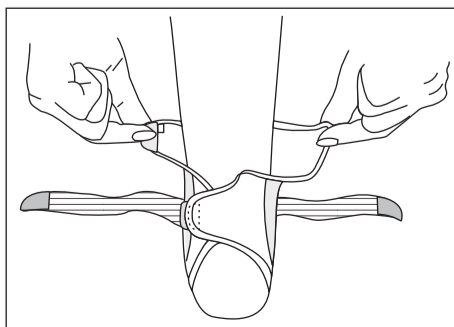


※右上の図を後ろからみた図


5. 本体を装着したら、左側にある伸縮ストラップを右に、右側にある伸縮ストラップを左に引張り、それぞれ図のように斜めになるようくるぶしの上部あたりで止めます。

注！伸縮ストラップは締めすぎないようにご注意ください。


完成図

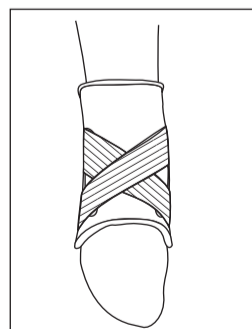

正面

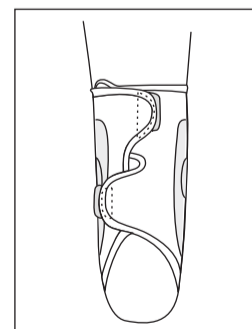

後ろ面

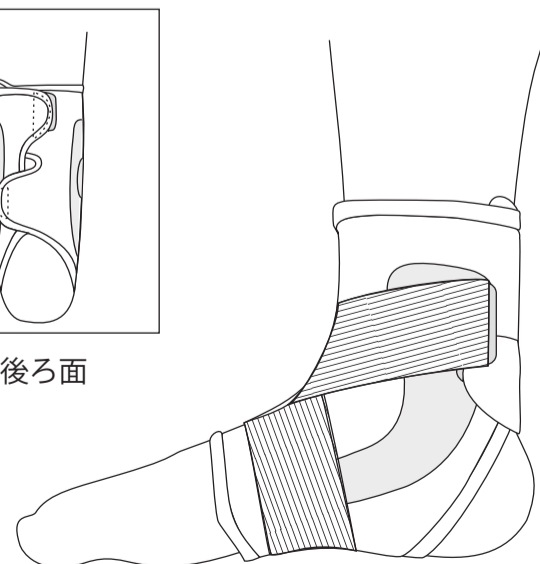

側面

厳密な検査をしていますが万一製品に不備な点がありましたら当社に直接お送り下さい。