

頸部固定帯


「ネックスター」使用説明書

注意

- 本品の使用に際しては、必ず医師の指示に従ってください。
- 本品の使用中に異常を感じた場合はただちに使用を中止し、医師にご相談ください。
- 面ファスナーが衣服につかないよう注意してください。

装着方法

- 面ファスナーのある両端を首の後ろに、中央部のへこみの部分に顎をのせるように装着してください。
- きつく感じたり、ゆるみがある場合は適宜調節してください。

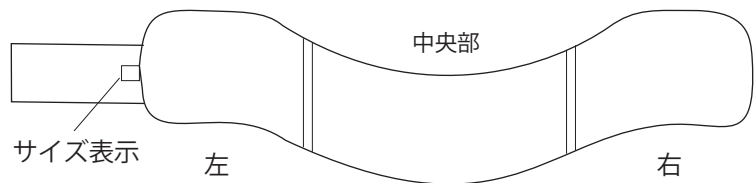

お手入れ方法

- 本体・カバーとも次の表示に従い洗濯してください。

お手入れ方法

