



らくらく点滴ショルダー

FM-134

取扱説明書



仕様

品名	らくらく点滴ショルダー		
品番	FM-134		
JAN	4968124217659		
耐荷重	約1kg (目安)		
材質	ショルダーベルト: ポリエステル/ネオプレン	点滴棒: PP/PC/ステンレス	
入数	ショルダーベルト: 1着	点滴棒: 1本	
サイズ	ショルダーベルト: 身幅約80~115cm×丈約37cm 点滴棒: 長さ 約30.5~95.5cm		
重量	ショルダーベルト: 約90g 点滴棒: 約100g		

MADE IN CHINA

販売元 **株式会社カーボーイ**

〒283-0803 千葉県東金市日吉台7-17-15
URL <http://www.car-boy.co.jp>

お客様相談室
フリーダイヤル

0120-110-457

【受付時間】 **平日** 9:00~18:00

各名称



使用方法



安全上のご注意

ご使用前にこの「安全上のご注意」を必ずお読みの上、正しくご使用ください。お使いになる人や他の人への危害、損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

⚠ 警告 誤った取り扱いをした時に死亡や重傷を負う可能性があるもの

⚠ 注意 誤った取り扱いをした時に軽傷、または物的損害に結びつくもの

本製品について

⚠ 警告

- 本製品は点滴用の薬剤が入ったボトルやバッグを吊るするためのスタンドとして使用します。それ以外の目的で使用しないでください。
- 分解・修理・改造は行わないでください。事故やケガ、故障の原因になります。
- 点滴棒の耐荷重は1kg(目安)です。これを超える重量がかからないようにしてください。
- 本製品が体型や体調・病状など、何らかの理由でそくわいな患者様への無理なご使用はおやめください。

⚠ 注意

- 輸液ポンプ等の取り付けはできません。
- 点滴棒を強い力で押し縮みさせる、振り回す、落下させる等はおやめください。破損の可能性があります。
- ご使用前には必ず本製品が正常にかつ安全に使用できることをご確認ください。
- 清潔な場所に保管してください。
- 小さなお子様の手の届くところ、火気のそば、高温多湿、直射日光の当たる場所で保管しないでください。

使用上のご注意

⚠ 注意

- ショルダーベルトを留める際は苦しくない程度にし、きつく締めすぎないでください。
- 患者様が重量に耐えられない場合は、耐荷重の目安に関わらず使用をおやめください。
- 在宅治療で使用の際は医師や看護師等の指示に従ってご使用ください。
- 点滴棒を差し込む前に、ショルダーベルトが面ファスナーでしっかりと留まっているか確認してください。留まっていない状態で差し込むと点滴棒が倒れるおそれがあり非常に危険です。
- 点滴棒はポケットの底までしっかりと差し込んでください。
- 輸液バッグのぐらつきを防ぐため、輸液バッグの栓は点滴棒の栓固定リングに必ず通してお使いください。
- 点滴棒はショルダーベルトに取り付けて使用するしないに関わらず、輸液バッグの傾きや揺れを防ぐため、垂直になるように調整してください。
- 点滴棒の伸び縮みが固い場合は市販の潤滑油などをご使用ください。

お手入れ方法

衛生的に長くお使いいただくため、定期的にお手入れすることをおすすめします。

- 点滴棒の汚れはアルコールで湿らせた柔らかい布で軽く拭いてください。
- ショルダーベルトは洗って使用できます。洗濯機を使う場合はネットに入れ中性洗剤をご使用ください。乾燥機は使用しないでください。