


ケープサージカルシリーズ

取扱説明書

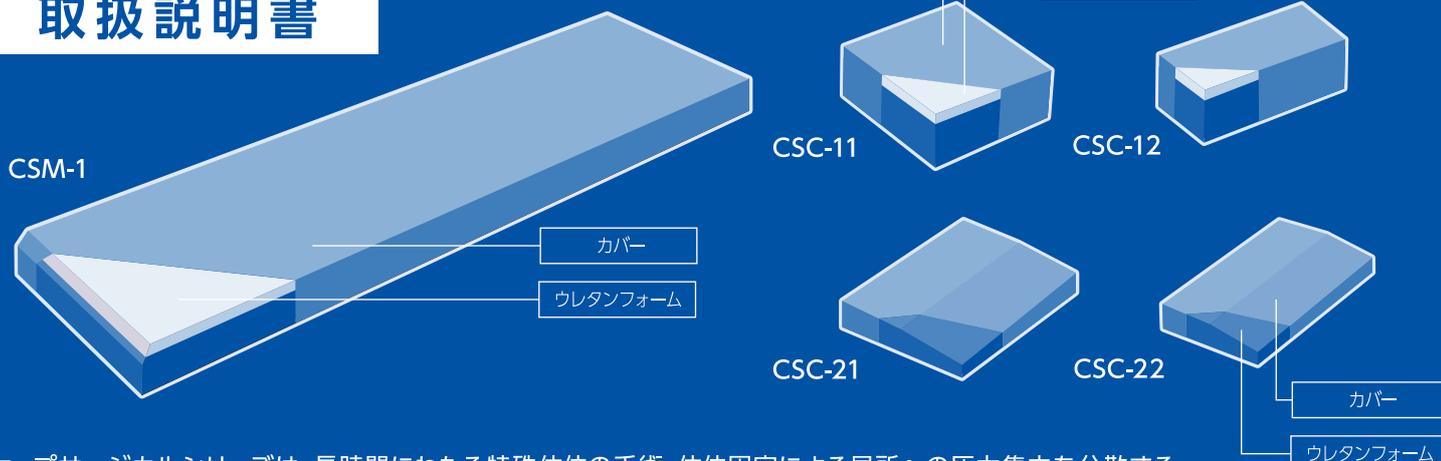

ケープサージカルシリーズは、長時間にわたる特殊体位の手術、体位固定による局所への圧力集中を分散する手術用の体圧分散式マットレス、クッションです。使用用途や使用部位にあわせてお選びいただけます。

安全にお使いいただくために

ケープサージカルシリーズの取り扱いにあたっては、本書をよく読んでご理解いただき、必ず本書の指示に従ってください。

重要安全情報

体圧分散式マットレス、クッションのご使用中に生じる可能性のある危険を回避するためには、その原因となる要素がどこにあるかを、予め知っておくことが不可欠です。しかし当社において、潜在的なあらゆる危険性を予測することは困難です。従って、本書には知り得る限りの安全に関する警告情報を、下記のように定義して記載してあります。



警告： このマークに従わなかった場合に、物的損害や負傷、死亡につながる恐れのある危険性を警告しています。特に重要なため、下記「警告1」、「警告2」にまとめて記載します。



1 体圧分散式マットレス、クッションは身体を広く、柔らかく支え、保持するのが特徴です。心臓マッサージ等、硬い床などの上でないと効果がでない処置にすぐ対応できるように備えてください。



2 体圧分散式マットレス、クッションのご使用に際しては、必ず専門家と相談の上で使用ください。またご使用中に身体に異常を感じたり、不安を感じた場合は直ちに使用を止め、専門家に相談してください。病状悪化や事故の恐れがあります。

使用上のご注意

- ご使用になる前に、マットレス、クッション上面に異物がないか確認してください。異物があるまま使用するとケガや事故の原因になる場合があります。
- 突起物のある場所にマットレス、クッションを設置して使用しないでください。
- 専用カバーを被せた状態でご使用ください。
- 無理な方向に力を加えないでください。破損の原因になります。
- 専用カバーおよびウレタンフォームが汚れた場合には、裏面のお手入れ方法に従ってください。
- 専用カバー表面は防水加工を施しておりますが、液体の侵入を完全に防ぐものではありません。縫い目部分等から液体が染み込む場合があります。
- 二人以上で使用しないでください。本来の性能を発揮できない恐れやマットレス、クッション破損の原因になります。
- 呼吸を妨げないような体位で使用してください。うつぶせ寝などの場合、窒息する恐れがあります。
- マットレスの端に座るときは、滑り落ちないように身体を支えてください。
- ストーブなどの火に近づけたり、高温のものに近づけないでください。
- 新品でウレタン臭がきつい場合は、カバーを取り外して風通しの良い日陰に半日ほど置くことで、臭いが発散します。
- ウレタンフォームに「永久歪み(へたり)」や「破損」が見られた場合は、交換をお願いいたします。
- 高温多湿や長時間直射日光が当たる場所でのご使用は避けてください。商品の劣化につながる恐れがあります。
- 本商品に異常や疑問を感じた場合は、お買い上げの販売店、もしくは(株)ケープまでお問い合わせください。

お手入れ方法

※業務用器械での洗浄・乾燥についてはお問い合わせください。

■ウレタンフォーム

- ウレタンフォームは洗浄・消毒に対応していません。
- 利用者の発汗などにより、マットレス・クッションの内部には徐々に湿気が溜まります。カビ等の原因になるため、定期的にカバーを取り外して半日程度の日陰干しを推奨します。ウレタンフォームが変色する場合がありますが、品質上の問題はありません。

■専用カバー

- ① 汚物(汚れ、便、血液等)を取除いてください。
- ② 水または、中性洗剤を水で薄めたものでマットレス、クッションの表面を拭いてください。消毒用アルコールによる清拭も可能です。
※汚れがひどい場合は③の洗浄方法をご参照ください。
- ③ 洗浄方法(カバーは取り外して洗浄してください)
洗濯の際は、商品に取り付けられている品質表示ラベル(洗濯ラベル)をご参照ください。
 - 水、ぬるま湯または薄めた中性洗剤を染み込ませた柔らかい布等で、洗濯する前に表面の汚れを予め取り除いてください。
 - 洗濯ネットに入れ、洗濯機で弱い洗いができます。洗濯機による洗濯、または手押し洗いをしてください。洗濯機をお使いの場合は、必ず洗濯ネットをご使用ください。
 - 十分にすすぎを行い、軽く脱水後、陰干しを行ってください。
 - 乾燥機でのタンブル乾燥はできません。
 - 漂白剤、柔軟剤の使用不可、アイロン、ドライクリーニング不可。

保管方法について

- 本商品を保管する際は、上に重いものを置いたり、圧縮された状態で保管しないでください。
- 高温多湿や直射日光の当たる場所は避けてください。

仕様

品番	C5M-1	C5C-11	C5C-12	C5C-21	C5C-22
サイズ(cm)	オーダーメイド	幅20×長18×厚8	幅10×長22×厚8	幅40×長30×厚6	幅40×長24×厚6
重量(g)	(厚10)	195	130	385	315
材質	専用カバー: ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・制菌・伸縮)				
	中身 1層目: 低反発ウレタンフォーム 2層目: 高反発ウレタンフォーム			中身: 高反発ウレタンフォーム	