

ケルンハリポイⅡ (KH-905)

ハリポイⅡ (廃棄物処理用品)は、注射針専用処理ボトルです。
投入口が大きいので、インスリン用注射針など大きな針も安全に廃棄・回収できます。

ハリポイⅡ (KH-905) ご使用注意事項

- 1 使用開始時に外キャップを外して、背面のキャップホルダーに取り付けてください。赤い外キャップはハリポイⅡを処分するときに必要となります。



使用した注射針は、針ケースをまっすぐかぶせ、注射針を回して取り外します。注射針にキャップし、容器の中に入れてください。
※ストップラインまで、注射針をためておくことができます。

- 3 自己注射針などを入れた後は、白い内キャップをその都度180°回して仮蓋をしてください。使用中も外キャップをし、二重蓋にすることで万が一転倒した場合でも中身がこぼれず安全です。針保護カバー・ケースのついている製品には、必ず保護カバーをつけてください。



4 本製品容量がストップラインにきましたら、回転式内キャップを改めて仮蓋をし、さらに使用開始時に本体裏面のキャップホルダーに取りつけたネジ式外キャップをはずし、内キャップの上しっかりと締めつけてください。その際、手袋を着用願います。その後、医療廃棄物回収業者に委託し廃棄処理を行ってください。

安全上のご注意！ 必ずお守りください

針突き抜けや針刺し事故を未然に防ぐため、次の注意事項を厳守してください。

- 本製品は注射針専用ボトルです。それ以外の針類は絶対に入れないでください。
- 使用開始時にははずした外キャップは、安全のために必ず裏面のキャップホルダーに取り付けてください。さらに外キャップは最後の廃棄処分する際必須となるものです。散逸防止のためにも裏面のキャップホルダーへの取り付けの励行をお願いいたします。
- 使用開始後、本体を落としたり、揺すったりしますと、針が内キャップから飛び出したり、あるいは万一にも本体を突き抜けることがないとも限りませんので十分ご注意ください。
- 白い内キャップは絶対に取り外さないでください。
- 本体を倒すなどすると針が飛び出る可能性があるため取扱いには注意してください。
- 本製品の使用については安定した場所でのご使用をお願いします。弊社別売りの固定金具のご利用をお薦めします。
- また使用開始後に、本体に触れる際には、事前に本体全体を目視するなどして十分安全を確認してください。
- 本体側面にある目盛りまでが注射針容量です。この目盛りを超えてのご使用は絶対におやめください。
- 本製品を滅菌等の目的で高温処理されますと変形を起こしますので、絶対におやめください。
- 直射日光のあたるところや高温多湿になるところでの保管はおやめください。
- 子供の手の届かぬところに保管してください。
- 本製品に入れる自己注射針、使用済の針は一般廃棄物ではありません。かかりつけ医療機関や薬局などから廃棄方法についての指示があった場合はそれに従い、公共の場所に廃棄せず、適正な廃棄をしてください。
- 器具などの添付文書や取扱説明書に廃棄方法についての指示がある場合はそれに従ってください。
- 本製品の再使用はできませんので絶対におやめください。

 株式会社ケルン