

抗菌足指サポーター 大小4個組

130×80mm




K100

抗菌足指サポーター 大小4個組

【使用方法】

- ①本製品のメッシュ部が足指の側面にくるように装着してください。
- ②足の指先までたるまず装着できていることを確認してください。

※サイズが長い場合はご自身の指の長さに合わせてハサミなどで切って長さを調整してください。

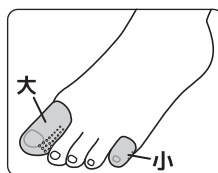

ご使用上の注意

●用途以外に使用しないでください。●素材臭を感じる場合があります。●開封時、本製品の品質保持のため白い粉が付着している場合があります。そのままご使用いただけますが、気になる場合は拭き取ってからご使用ください。●皮膚に湿疹・あせもなどがある場合は使用しないでください。●体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・不快感・痛みなどを感じる場合があります。使用中に気分が悪くなったり、身体に異常を感じた場合は直ちに使用を中止し、医師に相談してください。●ボディクリームや日焼け止めなどの化粧品をつけて使用されますと、本製品が傷みやすくなりますので使用しないでください。●足の爪が長い場合は、爪や指に負荷がかかりやすく、また本製品の内側が破損する恐れがありますので、装着前に爪の長さを整えてください。●着脱の際に強く引っ張りすぎないでください。●尖ったもので引っ掛けないようご注意ください。●使用開始時は1～2時間ぐらいの使用で、不快感や痛みがないことを確認してください。支障がない場合は使用時間を徐々に長くしてご使用ください。●薬品・薬剤によって変色・変質する場合があります。●火が直接当たるところや直射日光を避け、風通しの良い所に保管してください。●小さなお子様の手の届かないところに保管してください。

【お手入れ方法】

- 汚れた場合は中性洗剤で水洗いし、よく乾燥させてから使用してください。
- 漂白剤・乾燥機は使用しないでください。
- 洗った後にベタつきがある場合、ベビーパウダーなどを少量つけると軽減されます。

材質：水添ステン系熱可塑性エラストマー
サイズ：(大)6,0×3,6×0,4cm
(小)2,7×2,1×0,3cm
セット内容：(大)2個、(小)2個



発売元
コモライフ株式会社
お客様相談室 0120-561-244
土日祝除く 平日9時～12時と13時～17時

4 549081 915309

MADE IN CHINA

会社名 _____

氏名 _____

署名日 _____ 年 _____ 月 _____ 日

コモライフ株式会社
2022/10/14