

保管方法



- ・直射日光のあたる場所で保管しないでください。劣化の原因になります。
- ・クッションの上に重量物を置いたまま保管しないでください。変形・破損の恐れがあります。
- ・車いすのシートの材質によっては、摩擦で接地面を痛めたり、色移りすることがあります。本製品を設置する際はご注意ください。

製品仕様

■ 同梱品

- ・MOLA 本体（ウレタンフォーム、ラテックスフォーム、インナーカバー、アウターカバー）：1
- ・取扱説明書：1（本書）
- ・保証書：1

■ 寸法一覧
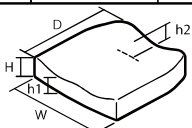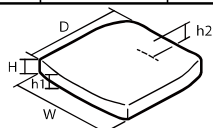
| 品名 | MOLA | | | | | | |
|----------|---|----------|----------|---|----------|----------|-----|
| | コンター | | | フラット | | | |
| | 380 幅 | 400 幅 | 430 幅 | 380 幅 | 400 幅 | 430 幅 | |
| |  | | |  | | | |
| 品番 | TC-ML38C | TC-ML40C | TC-ML43C | TC-ML38F | TC-ML40F | TC-ML43F | |
| サイズ (mm) | W | 380 | 400 | 430 | 380 | 400 | 430 |
| | D | 400 | | | | | |
| | h1：大腿部 | 約 75 | | | 約 60 | | |
| | h2：坐骨部 | 約 50 | | | 約 55 | | |
| H：最高部 | 約 87 | | | 約 65 | | | |
| 重さ (g) | 約 1,040 | 約 1,100 | 約 1,190 | 約 930 | 約 980 | 約 1,050 | |

■ 材質

- ・クッション本体：ウレタンフォーム、ラテックスフォーム
- ・インナーカバー：ポリウレタン、ポリエステル
- ・アウターカバー：【表材】ポリエステル / 【裏材】滑り止め加工付き PVC

■ 使用可能薬品（アウターカバー・インナーカバー清拭時） ※クッション本体には使用不可

- ◇ 76.9～81.4%：消毒用エタノール
- ◇ 0.05～0.2%：塩化ベンザルコニウム(オスバンなど)
- ◇ 0.05～0.2%：塩化ベンゼトニウム(ハイアミンなど)
- ◇ 0.05%：グルコン酸クロールヘキシジン(ヒビテンなど)
- ◇ 0.1～0.5%：次亜塩素酸ナトリウム(ピューラックスなど)



■ お問い合わせ先

心を形にするテクノロジー、あります。
TAKANO HeartWorks タカノ株式会社

〒399-4431 長野県伊那市西春近下河原5331
TEL. 0265-72-3157 FAX. 0265-72-3203

タカノ・ハートワークスWEBサイト：

<https://www.takano-hw.com/>

E-mail：fukushi@takano-net.co.jp

タカノお客様相談窓口

0120-825-845

(受付時間 土日祝日除く 月～金曜日 9:00～17:00 携帯電話からもご利用いただけます。)

※混雑時にはつながりにくい場合があります。時間をおいてからお掛け直しください。

Rev.1 (2023.01.26)

ー 車いす用クッション ー




タカノクッション MOLA 取扱説明書

本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。



- この説明書には、本製品を安全にお使いいただくための注意事項と使用方法を記載しています。
- ご使用前によくお読みの上、正しく安全な取扱い方法を十分理解されてからお使いください。
- この説明書は、いつでも出して見れるよう、大切に保管してください。
- お求めいただきました製品の仕様、外観、価格は予告なしに変更することがあります。

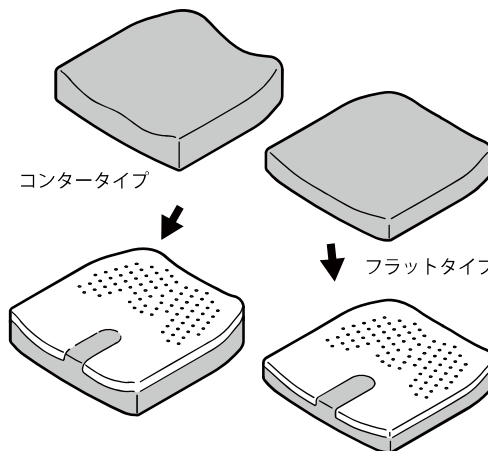特長




- この製品は、3次元形状のモールドウレタンフォームとラテックスフォームを組合せ、体圧分散性・姿勢保持と耐久性に優れたクッションです。
- 形状の異なる2タイプにそれぞれ幅を3種類用意しています。
- カバーはインナーカバーとアウターカバーの2重構造で、インナーカバーは耐薬品性と防水機能を持っています。
- 軽量のため取り扱いも楽に行えます。

車いすへの設置方法

- 表示タグ【】とブランドタグ【】の位置を確認して設置してください。
- クッションは、車いすの奥まで入れて使用してください。

- ❗ 底面（滑り止め面）を上にして使用しないでください。
- ❗ クッションは医師や専門家にご相談のうえで使用ください。
- ❗ クッションをご使用中に身体に異常を感じたり、不調が発生した場合にはすぐに使用を中止し、医師や専門家にご相談ください。

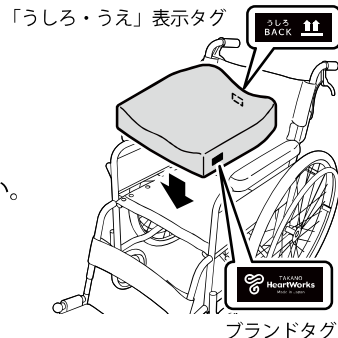

使用上の注意

- ラテックス（天然ゴム）アレルギーの方は、ご使用前に医師にご相談ください。
- 誤って製品を破損した場合は、本製品の使用を中止してください。
- 分解して口の中に入れたり、飲み込んだりしないでください。
- 切断したり、穴をあけたりしないでください。
- 火気や高温な場所には近づけないでください。
- クッションを折り曲げて使用しないでください。

お手入れ方法

■ アウターカバー

- アウターカバーのファスナーを完全に開け、本体（青色）から取り外してください。
- 液温 30℃以下にて中性洗剤で、洗濯ネットに入れて洗濯してください。
※漂白剤、柔軟剤は使用しないでください。色落ちの原因となります。
- 軽くしぼってください。脱水機もご利用いただけます。
※煮沸消毒、アイロンかけ、商業クリーニング、乾燥機の使用はできません。
- 日陰干して完全に乾燥させてください。 ※完全に乾燥しないとカビ発生の原因となります。




- アウターカバーを取り付ける際は以下の手順に従ってください。

アウターカバー（黒色）に本体（青色）を入れます

- アウターカバーの表示タグ【】とブランドタグ【】の位置を確認し、インナーカバーの「この面が底」と表記の面が底面となるように装着します。

- ※ファスナーを閉じる際は確実に最後まで閉じていることをご確認ください。

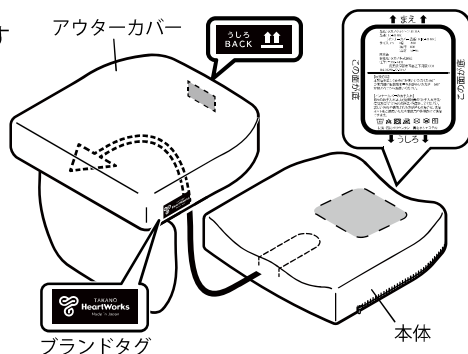

■ インナーカバー


- ❗ 基本的に、カバーは外さずに清拭のみでお手入れしてください。

- 本製品の表面を清拭消毒する際は、必ず本書に記載の薬品を指定の濃度を守って使用してください。また、各消毒液の指示に従って使用してください。
- 清拭後、日かげで自然乾燥させてください。※天日干しはしないでください。

- インナーカバーを外す場合は、ファスナーを完全に開け、ウレタンフォームとラテックスフォームからゆっくりと丁寧に取り外してください。
※ラテックスフォームとインナーカバーが引っ付いて外れにくい場合があります。その際は、無理に外さないでください。破損の原因となります。
- インナーカバーを洗濯する際は、アウターカバーのお手入れ方法をご参照ください。


- インナーカバーを取り付ける際は以下の手順に従ってください。


- ウレタンフォームに、ラテックスフォームをのせます
 - ウレタンフォームの凸部にラテックスフォームの切り欠き部を合わせてください。
※ラテックスフォームに裏表の区別はありません。

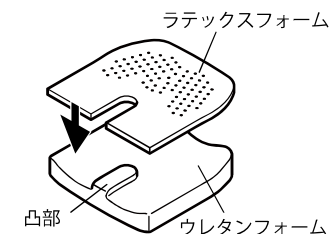

- ❗ ラテックスフォームとウレタンフォーム単体で使用しないでください。
- ❗ 製品の特性上、表面にしわが生じたり、気泡が表面化することがありますが、使用上問題はありません。

- インナーカバー（青色）に本体を入れます

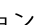- ① クッション本体の下図の矢印部をしっかり持ち、インナーカバーの奥まで入れます。
- ② インナーカバー後側をクッション本体にかぶせ、ファスナーを閉じます。
※この時、ファスナーが確実に最後まで閉じていることをご確認ください。

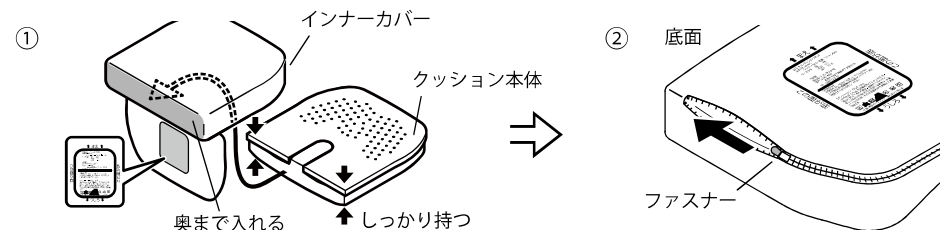

■ クッション本体

- 汚れなどは、柔らかい布に中性洗剤を含ませ、軽く拭き取ってください。
- 水分が本体のウレタンフォームまたはラテックスフォームに浸透してしまった場合は、風通しの良い場所で日かげの平干しにて乾燥させてください。
- ❗ 製品の特性上、表面に下記のような気泡やしわが生じている場合がありますが、使用上問題はありません。



(i) ウレタンフォームの気泡

(ii) ラテックスフォームのしわ