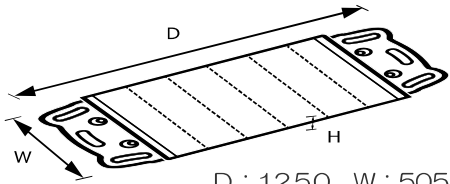


## 保管方法

- 直射日光の当たる場所で保管しないでください。  
劣化の原因になります。
- のせかえくんスライドの上に重量物を置いたまま保管しないでください。  
変形・破損の恐れがあります。
- 長期保管する際は、本説明書の指示に従ってお手入れをし、保管してください。

## 仕様

サイズ (mm)	 D : 1250 W : 505 H : 10	
重量	2 kg	
素材	アウターシート 本体シート グリップボード インナープレート インナークッション 固定バンド	ナイロン 100% ナイロン 100% ポリプロピレン ポリプロピレン ポリエチレン ナイロン、ポリプロピレン
原産国	日本製	

## お問い合わせ先

心を形にするテクノロジー、あります。 **TAKANO HeartWorks タカノ株式会社**

〒399-4431 長野県伊那市西春近下河原5331  
TEL. 0265-72-3157 FAX.0265-72-3203

タカノハートワークスWEBサイト：<https://www.takano-hw.com/>  
E-mail：[fukushi@takano-net.co.jp](mailto:fukushi@takano-net.co.jp)

タカノお客様ご相談窓口 **0120-825-845**

(受付時間 土日祝日除く 月～金曜日 9:00～17:00 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。)

※ 混雑時にはつながりにくい場合があります。 時間をおいてからお掛け直してください。



使用方法の動画視聴はコチラから →

Rev.1 (2022.06.01)

## < 移乗ボード >

# のせかえくんスライド

## 取扱説明書




## ごあいさつ

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

- この説明書には< 移乗ボード > のせかえくんスライドを安全にお使いいただくための注意事項と使用方法を記載しています。
- ご使用前によくお読みの上、正しく安全な取り扱い方法を十分理解されてからお使いください。
- この説明書は、いつでも出して見る事ができるように、大切に保管してください。
- お求めいただきました製品の仕様、外観、価格は予告なしに変更することがあります。

## 各部の名称・特長

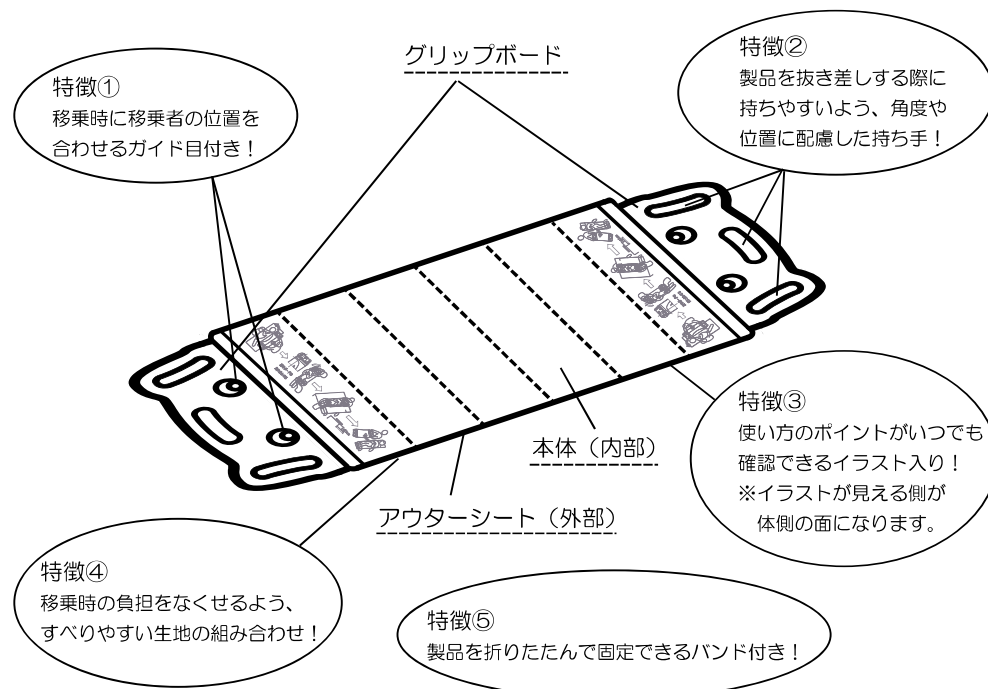

## 開封後の確認

製品開封の後に以下のものが入っていることをご確認ください。

内容物：本体（アウターシートとグリップボードは取付済）	：	1セット
固定バンド	：	1本
取扱説明書（本紙）	：	1冊


## 使用前の確認

- 本体内部に芯材が確実に入っていることをご確認ください。
- 本体にマジックテープが固定されていることをご確認ください。
- 有害な傷・破れ・ほつれがないことをご確認ください。

## ご利用方法


### 手順 1

・寝ている方を側臥位にして、  
移乗ボード“のせかえくん  
スライド”を敷きこみます。

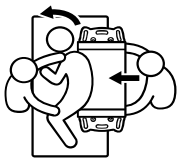


### 手順 2

・寝ている方を側臥位から仰臥位に戻します。  
・製品の片目が、寝ている方の肩で  
見えなくなるくらいが目安になります。  
※この時、臀部と脚が製品に確実に  
乗っていることをご確認ください。

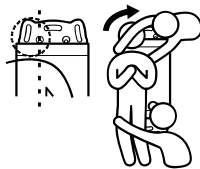

### 手順 3

- ① 移乗させる機器をベッドに横付けし、  
ベッドの高さを調節します。  
※ベッドと機器の高さの差は5cm以内
- ② 機器のストッパーをかけます。  
※ベッドと機器の隙間は10cm以内
- ③ 介助者（2名）が寝ている方の体を  
支えながら滑らすように機器に移乗  
させます。

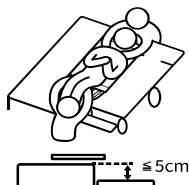

### 手順 4

・寝ている方が機器に完全に  
移乗できたことが確認できたら、  
グリップボードをつかみ、  
ゆっくり製品を引き抜いて  
ください。



## 使用上の注意

- 局部的に過度な荷重や衝撃を与えないでください。
- 誤って製品を破損した場合は、本製品の使用を中止してください。
- 切断したり、穴をあけたりしないでください。
- 火気や高温な場所には近づけないでください。
- 芯材及びグリップボードを折り曲げて使用しないでください。
- 担架のような使い方はしないでください。
- 本製品をご使用の際は、医師や専門家にご相談のうえ使用してください。
- 使用していると、イラストが摩耗により薄くなる場合がございますが、使用上問題は  
ございません。

## お手入れ方法

### 本体のお手入れ

- 本体が汚れたり、使用される方が代わる際は、必ず全面を下記の手順（①～③）に従ってお手入れ  
してください。
- ▲ 本体は洗濯をせず、清拭のみでお手入れしてください。
- ① 石鹸水（市販の石鹸、中性洗剤などを水で薄めたもの）で本製品の表面を拭き、汚れを落として  
ください。
- ② 消毒液で本製品の表面を清拭消毒してください。  
消毒液は、必ず下記の薬品を、指定の濃度を守って使用してください。  
また各消毒液の指示に従って使用してください。
  - ・76.9～81.4% ：消毒用エタノール
  - ・0.05～0.2% ：塩化ベンザルコニウム（オスバンなど）
  - ・0.05～0.2% ：塩化ベンゼトニウム（ハイアミンなど）
  - ・0.05% ：グルコン酸クロルヘキシジン（ヒビテンなど）
  - ・0.1～0.5% ：次亜塩素酸ナトリウム（ピューラックスなど）
- ③ 清拭後、自然乾燥させてください。※天日干しはしないでください。

### アウターシートのお手入れ

- ① アウターシートは液温80℃以下にて中性洗剤で、洗濯ネットに入れて洗濯してください。
  - ② 洗濯完了後、軽くしぼって陰干ししてください。  
※完全に乾燥しないとカビ発生の原因となります。
- ▲ ドライクリーニングや塩素系の漂白はしないでください。
  - ▲ 脱水機及び乾燥機は使用しないでください。破損の原因となります。
  - ▲ アイロンは使用しないでください。溶解・変質・変色の原因となります。