

## 簡単マニュアル

### 同封物

スワブ



返送用封筒



書類一式

- ・簡単マニュアル（本シート）
- ・個人情報取り扱い同意書※要返送
- ・検査IDのご案内
- ・パンフレット


### 検査の流れ



①膣内から検体を採取  
スワブを膣に3～5cm  
挿入して検体を採取。  
約15秒で完了。



②アンケートに回答  
下記QRコードから回答。

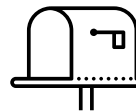

③検体・同意書を返送  
返送用封筒に検体（①）  
と「個人情報取り扱い同  
意書」を入れ、POSTに  
投函。




④WEBで結果を確認  
検体が弊社に到着後、3週間  
程度で、「検査IDのご案内」  
に記載のURLより、検査IDを  
入力することで、WEB上で結  
果の確認が可能。

詳しい採取方法は裏面  
をご確認ください。

## 検体の採取方法について


手と膣周りを清潔にした状態で採取してください。  
※膣内洗浄など過度な洗浄は必要ありません。

### 1. スワブを容器から取り出す

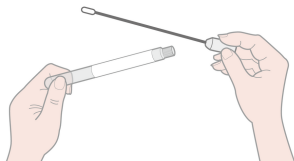


容器をひねって開封します。

### 2. 膣口に挿入する

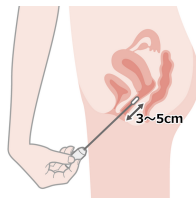


楽な姿勢で、スワブの先端部分を3~5cm程度、膣内に挿入します。

### 3. 検体を採取する

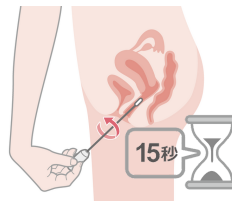

スワブを膣壁に沿って、ゆっくりと回します。  
1周5秒程度で、3周します。

### 4. 検体を乾燥させ容器に戻す

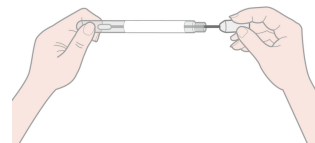

検体を7~8分自然乾燥させたのち、容器に戻します。

その後、

1. アンケートへの回答

2. 検体と同意書を返送用封筒に入れてポスト投函を忘れずに！

### 注意事項

- ・月経中と月経後3日間は検体採取を避けてください。
- ・妊娠中の検体採取は医師にご相談をお願いします。
- ・スワブは滅菌済みのため、持ち手部分以外は手を触れたり、置いたりしないようにしてください。
- ・検体採取時にスワブにわずかな出血がみられる可能性があります。
- ・採取キットは常温保管してください。
- ・到着後、30日以内に採取、発送をお願い致します。