

INDEX

使用上の注意	2
各部の名称	3～4
組み立てについて・ヘッドレストについて	5
肘かけと安全ベルトについて	6
乗り降りについて・メッシュシートについて	7
リクライニングについて	8
キャスターについて・後輪直進ガイドについて	9
メッシュシート部のお手入れ方法・日常のお手入れ・保管方法	10
消耗品について・廃棄について	10
保証基準、保証書	11

※ALIX取扱いの注意※

この商品のリクライニングは、ガスシリンダーで行います。背もたれパイプ上部に差し込まれた、空気出入ホースは、リクライニング可動時の空気出し入れ口になります。通常の使用以外に、製品本体を水につけたり、ホースを抜いたり、背もたれパイプ内に直接水を入れしないで下さい。又、シリンダーやジャバラゴムを傷つけないで下さい。ガスシリンダーの破損につながります。上下リクライニングが利かなくなった場合は、直ちに使用をやめ、シリンダー部分を取り外し弊社へお送り下さい。オーバーホール致します。(別料金)

※シリンダーは、使用状態・使用頻度により1年未満でもオーバーホールが必要になる場合があります。また、シリンダー下部内管(P.3各部の名称参照)に石鹸垢等の付着物がついていると作動しなくなりますのでご注意下さい。

INDEX

使用上の注意	2
各部の名称	3～4
組み立てについて・ヘッドレストについて	5
肘かけと安全ベルトについて	6
乗り降りについて・メッシュシートについて	7
リクライニングについて	8
キャスターについて・後輪直進ガイドについて	9
メッシュシート部のお手入れ方法・日常のお手入れ・保管方法	10
消耗品について・廃棄について	10
保証基準、保証書	11

※ALIX取扱いの注意※

この商品のリクライニングは、ガスシリンダーで行います。背もたれパイプ上部に差し込まれた、空気出入ホースは、リクライニング可動時の空気出し入れ口になります。通常の使用以外に、製品本体を水につけたり、ホースを抜いたり、背もたれパイプ内に直接水を入れしないで下さい。又、シリンダーやジャバラゴムを傷つけないで下さい。ガスシリンダーの破損につながります。上下リクライニングが利かなくなった場合は、直ちに使用をやめ、シリンダー部分を取り外し弊社へお送り下さい。オーバーホール致します。(別料金)

※シリンダーは、使用状態・使用頻度により1年未満でもオーバーホールが必要になる場合があります。また、シリンダー下部内管(P.3各部の名称参照)に石鹸垢等の付着物がついていると作動しなくなりますのでご注意下さい。

メッシュシート部のお手入れ方法

かるく手洗いが基本ですが、洗濯機を利用する場合は、網の小さな洗濯ネットに入れ、「よわく」で短時間で行って下さい。お手入れ後、縫製箇所を確認下さい。使用頻度により縫製箇所が外れている場合は、使用をさけ、新しい物(別売)に取り替えて下さい。

- 注意：シンナー、ベンジン、塩素系漂白剤等揮発性溶剤は使用できません。
- 注意：網目の破損等につながりますので、ブラシ等でこすらないで下さい。
- 注意：網目や縫製箇所に破損等がないか、確認して下さい。破損が発見された場合は、使用しないで下さい。

日常のお手入れ・保管方法 永く美しくご利用いただくために

- ネジ・ナットやキャスター取り付け部等のゆるみがないか点検して下さい。もしゆるみが生じた場合はゆるまないように締めて下さい。
 - 注意：可動部分は、締めすぎると動かなくなりますのでご注意下さい。
- 汚れは、できるだけ早く落とし、十分に水分を取り、乾いた布で拭き、乾燥させて下さい。
 - 注意：セッケン、シャンプー等が本商品に残らないようにご注意下さい。
 - 注意：シンナー、ベンジン、塩素系漂白剤等揮発性溶剤を使用しないで下さい。
- キャスターやタイヤの摩耗やキズ等がないか確認して下さい。
- 使用しない時は、室内の清潔で安全な場所に保管して下さい。
 - 注意：キャスターが変形する場合がありますので、ストッパー(ロック)を掛けたまま保管しないで下さい。
 - 注意：キャスターが床材によっては化学変化する場合がありますので、保管にはご注意下さい。
 - 注意：本商品は、ステンレス製ですが、使用状態によりサビる場合があります。
- 取扱い説明書は、本体とともに保管して下さい。 ※お修理等の場合の代替品のご用意はございませんので、予めご了承ください。

消耗品について

使用状態・使用頻度・年数等により、消耗・劣化する部品がございますので、時々点検の上、交換して下さい。

廃棄について

地球環境保護のため、放置しないで下さい。各自治体の指示に従って処分、廃棄して下さい。

メッシュシート部のお手入れ方法

かるく手洗いが基本ですが、洗濯機を利用する場合は、網の小さな洗濯ネットに入れ、「よわく」で短時間で行って下さい。お手入れ後、縫製箇所を確認下さい。使用頻度により縫製箇所が外れている場合は、使用をさけ、新しい物(別売)に取り替えて下さい。

- 注意：シンナー、ベンジン、塩素系漂白剤等揮発性溶剤は使用できません。
- 注意：網目の破損等につながりますので、ブラシ等でこすらないで下さい。
- 注意：網目や縫製箇所に破損等がないか、確認して下さい。破損が発見された場合は、使用しないで下さい。

日常のお手入れ・保管方法 永く美しくご利用いただくために

- ネジ・ナットやキャスター取り付け部等のゆるみがないか点検して下さい。もしゆるみが生じた場合はゆるまないように締めて下さい。
 - 注意：可動部分は、締めすぎると動かなくなりますのでご注意下さい。
- 汚れは、できるだけ早く落とし、十分に水分を取り、乾いた布で拭き、乾燥させて下さい。
 - 注意：セッケン、シャンプー等が本商品に残らないようにご注意下さい。
 - 注意：シンナー、ベンジン、塩素系漂白剤等揮発性溶剤を使用しないで下さい。
- キャスターやタイヤの摩耗やキズ等がないか確認して下さい。
- 使用しない時は、室内の清潔で安全な場所に保管して下さい。
 - 注意：キャスターが変形する場合がありますので、ストッパー(ロック)を掛けたまま保管しないで下さい。
 - 注意：キャスターが床材によっては化学変化する場合がありますので、保管にはご注意下さい。
 - 注意：本商品は、ステンレス製ですが、使用状態によりサビる場合があります。
- 取扱い説明書は、本体とともに保管して下さい。 ※お修理等の場合の代替品のご用意はございませんので、予めご了承ください。


消耗品について

使用状態・使用頻度・年数等により、消耗・劣化する部品がございますので、時々点検の上、交換して下さい。


廃棄について

地球環境保護のため、放置しないで下さい。各自治体の指示に従って処分、廃棄して下さい。

キャスターについて □警告：必ず介助者がついて、ご使用者の安全を確認しながら、移動、操作して下さい。

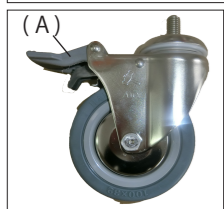

ステンレス製ダブルロックキャスター(スパナサイズ23)

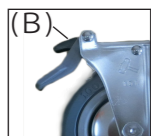

□車輪の回転と取付部施回同時ロック

外枠レバー(A)を押すとロックが掛かり、内レバー(B)を押すとロックが解除されます。

- 警告：手や足を挟まないようご注意ください。 □注意：足で操作する場合は、必ず上履きをご使用下さい。
- 注意：キャスターの操作は確実にを行い、正しく作動するか点検して下さい。
- 注意：床材によっては、車輪が付着する場合がありますのでご注意ください。
- 注意：キャスターのロック(ストッパー)を掛けた状態で動かすと、本体取りつけ部にゆるみが生じることがあります。ゆるんだ状態のままご使用になると、けがや事故・故障の原因になりますのでご注意ください。(スパナ23とハンマーを用いて確実に締めて下さい。)
- 注意：キャスターは、湯垢、洗剤等の汚れや髪の毛等の異物により異状を起こす場合がありますので、下記の日常のお手入れ・保管方法に従って清潔に保って下さい。
- 注意：使用当初においてキャスターより油がでる場合がありますが、ベアリング部の余分な油が、お湯等に溶けて流れ出した物で、本商品の強度、その他操作性などに関係ありませんので、ご安心下さい。

後輪直進ガイドについて □警告：必ず介助者が、ご使用者の安全を確認しながら、操作して下さい。


本商品は、前後ともキャスターで、小回りや横移動に大変便利です。但し移動する際、直進性や方向性を保ちにくい場合は、直進ガイドをご利用下さい。(リクライニング中は、後輪直進ガイドをご利用いただくより安定します。)

□ガイドを利用する場合 キャスターが付いている角パイプと後輪が直線になりロックレバーが後ろに 直進ガイドを掛ける 来るようにして、直進ガイドを下ろします。


□ガイドを解除する場合 キャスターのカバーを傷付けないように注意しながら、直進ガイドを上げます。

- 警告：手や指を挟まないようご注意ください。
- 注意：操作は確実にを行い、使用前には正しく作動するか点検して下さい。
- 注意：直進ガイドを掛けた状態で横に動かしたり、直進ガイドを過信しないで下さい。


直進ガイドを掛ける

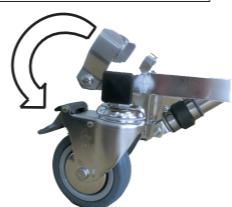

キャスターについて □警告：必ず介助者がついて、ご使用者の安全を確認しながら、移動、操作して下さい。

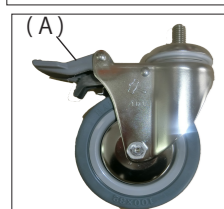

ステンレス製ダブルロックキャスター(スパナサイズ23)

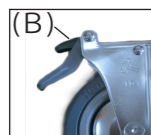

□車輪の回転と取付部施回同時ロック

外枠レバー(A)を押すとロックが掛かり、内レバー(B)を押すとロックが解除されます。

- 警告：手や足を挟まないようご注意ください。 □注意：足で操作する場合は、必ず上履きをご使用下さい。
- 注意：キャスターの操作は確実にを行い、正しく作動するか点検して下さい。
- 注意：床材によっては、車輪が付着する場合がありますのでご注意ください。
- 注意：キャスターのロック(ストッパー)を掛けた状態で動かすと、本体取りつけ部にゆるみが生じることがあります。ゆるんだ状態のままご使用になると、けがや事故・故障の原因になりますのでご注意ください。(スパナ23とハンマーを用いて確実に締めて下さい。)
- 注意：キャスターは、湯垢、洗剤等の汚れや髪の毛等の異物により異状を起こす場合がありますので、下記の日常のお手入れ・保管方法に従って清潔に保って下さい。
- 注意：使用当初においてキャスターより油がでる場合がありますが、ベアリング部の余分な油が、お湯等に溶けて流れ出した物で、本商品の強度、その他操作性などに関係ありませんので、ご安心下さい。

後輪直進ガイドについて □警告：必ず介助者が、ご使用者の安全を確認しながら、操作して下さい。


本商品は、前後ともキャスターで、小回りや横移動に大変便利です。但し移動する際、直進性や方向性を保ちにくい場合は、直進ガイドをご利用下さい。(リクライニング中は、後輪直進ガイドをご利用いただくより安定します。)

□ガイドを利用する場合 キャスターが付いている角パイプと後輪が直線になりロックレバーが後ろに 直進ガイドを掛ける 来るようにして、直進ガイドを下ろします。

□ガイドを解除する場合 キャスターのカバーを傷付けないように注意しながら、直進ガイドを上げます。

- 警告：手や指を挟まないようご注意ください。
- 注意：操作は確実にを行い、使用前には正しく作動するか点検して下さい。
- 注意：直進ガイドを掛けた状態で横に動かしたり、直進ガイドを過信しないで下さい。

直進ガイドを掛ける

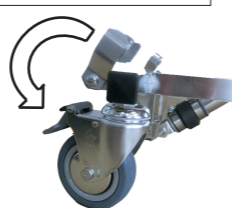

※おねがい※ 体格・体調やご利用者様の動かれ方によっては、使用が危険なこともありますので、安全に使用できるかどうか、ご自身又は介助者様をご判断下さい。

使用上の注意 よくお読みの上必ず守って下さい。

下記のご使用はできません。	
□禁止	□体重100kg以上の方 □柔らかい所での使用 □二人以上での使用(介助者除く) □温泉での使用 □本商品の、造作変更による使用 □屋内以外での使用 □揺れや動きのある所での使用 □段差や傾斜のある場所での使用 □床がアスファルトの場所での使用 □暖房やその他火器の近くでの使用 □非常にすべりやすい所での使用 □その他、危険と思われる所での使用
本体の破損や異状の原因になるもの(点検)	
□注意	□組立て調整は、確実に行って下さい。 □ロック金具等が、確実に掛かっているか確認して下さい。 □ネジ、ナット、キャスター取り付け部のゆるみがないか確認して下さい。 □リクライニングや可動肘、ヘッドレストが正しく作動するか確認して下さい。 □ロック(ストッパー)等が、正しく効くか確認して下さい。 □ロック(ストッパー)を過信しないで下さい。 □ロック(ストッパー)を掛けた状態で動かさないで下さい。 □車輪の磨耗等がないか確認して下さい。 □キャスターが正しく作動するか確認して下さい。(キャスター説明参照) □床材によっては車輪が付着する場合がありますのでご注意ください。 □本商品は、ステンレス製ですが、使用状態によりサビる場合があります。□本商品を、放置しないで下さい。
本体の破損や転倒、けがの原因になるもの	
□警告	□本商品は、必ず介助者が付いて使用して下さい。 □座面以外の所へは、座らないで下さい。 □本商品を、踏み台等として使用しないで下さい。 □乗り降りの際は、必ずストッパーを掛けて下さい。 □座面より前後左右に身体を乗り出さないで下さい。 □ステップの上に足を乗せて、乗り降りしないで下さい。 □使用の際、バランス等に十分ご注意ください。 □本商品に荷物を乗せたり吊したりしないで下さい。 □使用中、足を足元クッションやステップから離さないで下さい。 □リクライニング中は肘かけを上げてご使用下さい。 □本商品に、急激な衝撃や圧力をかけないで下さい。(乗り降り・リクライニング含む) □リクライニングや肘かけ等を操作する場合、手や身体を挟まないようご注意ください。 □車輪を持ち上げた状態で使用しないで下さい。 □その他、危険と思われる使用方法は、さけて下さい。

※おねがい※ 体格・体調やご利用者様の動かれ方によっては、使用が危険なこともありますので、安全に使用できるかどうか、ご自身又は介助者様をご判断下さい。

使用上の注意 よくお読みの上必ず守って下さい。

下記のご使用はできません。	
□禁止	□体重100kg以上の方 □柔らかい所での使用 □二人以上での使用(介助者除く) □温泉での使用 □本商品の、造作変更による使用 □屋内以外での使用 □揺れや動きのある所での使用 □段差や傾斜のある場所での使用 □床がアスファルトの場所での使用 □暖房やその他火器の近くでの使用 □非常にすべりやすい所での使用 □その他、危険と思われる所での使用
本体の破損や異状の原因になるもの(点検)	
□注意	□組立て調整は、確実に行って下さい。 □ロック金具等が、確実に掛かっているか確認して下さい。 □ネジ、ナット、キャスター取り付け部のゆるみがないか確認して下さい。 □リクライニングや可動肘、ヘッドレストが正しく作動するか確認して下さい。 □ロック(ストッパー)等が、正しく効くか確認して下さい。 □ロック(ストッパー)を過信しないで下さい。 □ロック(ストッパー)を掛けた状態で動かさないで下さい。 □車輪の磨耗等がないか確認して下さい。 □キャスターが正しく作動するか確認して下さい。(キャスター説明参照) □床材によっては車輪が付着する場合がありますのでご注意ください。 □本商品は、ステンレス製ですが、使用状態によりサビる場合があります。□本商品を、放置しないで下さい。
本体の破損や転倒、けがの原因になるもの	
□警告	□本商品は、必ず介助者が付いて使用して下さい。 □座面以外の所へは、座らないで下さい。 □本商品を、踏み台等として使用しないで下さい。 □乗り降りの際は、必ずストッパーを掛けて下さい。 □座面より前後左右に身体を乗り出さないで下さい。 □ステップの上に足を乗せて、乗り降りしないで下さい。 □使用の際、バランス等に十分ご注意ください。 □本商品に荷物を乗せたり吊したりしないで下さい。 □使用中、足を足元クッションやステップから離さないで下さい。 □リクライニング中は肘かけを上げてご使用下さい。 □本商品に、急激な衝撃や圧力をかけないで下さい。(乗り降り・リクライニング含む) □リクライニングや肘かけ等を操作する場合、手や身体を挟まないようご注意ください。 □車輪を持ち上げた状態で使用しないで下さい。 □その他、危険と思われる使用方法は、さけて下さい。

各部の名称



各部の名称



リクライニングについて □注意：必ず介助者がついて、ご使用者の安全を確認しながら、操作して下さい。

※おねがい※ 介助者はリクライニング操作する場合、必ず乗っているご使用者に、リクライニングする事と、何ら力を加える事なく、肘を肘かけに軽くのせ、ステップに正しく足をのせ、ゆったりと背もたれにもたれ掛けた姿勢でよい事を伝え、ご使用者自身が安心感を持たれるようにして下さい。

□警告：リクライニング中は、必ずご使用者の手や足が正しい位置にあるか確認し、手や足、身体をパイプに挟む事がないよう十分ご注意ください。又、介助者も同様に、ご注意ください。

□警告：リクライニング中は、後輪直進ガイドをご利用いただくとより安定します。

□注意：リクライニングレバーを握るとガスシリンダーの伸びようとする力により起きてきますが、この力はご使用者の体重が掛かった場合でも、介助者が簡単に操作できるようにするためのものです。

リクライニングの操作方法 □注意：本シャワーキャリーは、浴槽につけての使用はできません。

全キャスターをロックし、ハンドルパイプに手をかけ、リクライニングレバーを握った状態で、ハンドルパイプに少し力をかけ、ゆっくりと上げ下げして下さい。リクライニングレバーを放すと固定します。

(注意：リクライニング操作中、ご使用者の体重により、ゆっくり起きあがる場合とゆっくり下がる場合がありますが、このような場合は体重を利用し操作して下さい。又、空車の場合は、背が起こせない場合は、片膝を座面に置き、レバーを握り、背を起こしてください。)

□警告：キャスターのロックを掛けて下さい。(後輪直進ガイドご利用可)

□警告：安全ベルトはリクライニングすると、少し締まりますので、必ず少しゆるめに装着して下さい。


□警告：手や足、身体を挟まないようご注意ください。

□警告：リクライニング中は、肘や手を肘かけより動かさないで下さい。

□警告：リクライニング中は、バランス等に十分ご注意ください。

□注意：リクライニング中は、ステップに正しく足をのせてご使用下さい。

□注意：リクライニング中、その他の操作はしないで下さい。

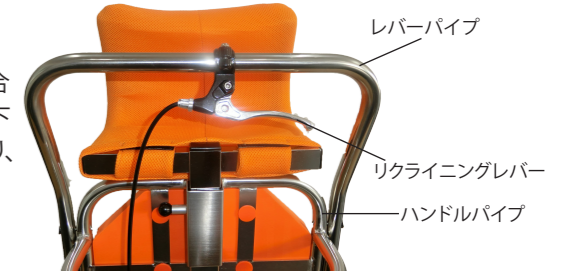

肘かけは、体型や状態に合わせて高さ調節し、ご使用者の肘から手を、肘かけに軽くのせ、安全にリクライニングできる状態をつくり、操作して下さい。

リクライニングについて □注意：必ず介助者がついて、ご使用者の安全を確認しながら、操作して下さい。

※おねがい※ 介助者はリクライニング操作する場合、必ず乗っているご使用者に、リクライニングする事と、何ら力を加える事なく、肘を肘かけに軽くのせ、ステップに正しく足をのせ、ゆったりと背もたれにもたれ掛けた姿勢でよい事を伝え、ご使用者自身が安心感を持たれるようにして下さい。

□警告：リクライニング中は、必ずご使用者の手や足が正しい位置にあるか確認し、手や足、身体をパイプに挟む事がないよう十分ご注意ください。又、介助者も同様に、ご注意ください。

□警告：リクライニング中は、後輪直進ガイドをご利用いただくとより安定します。

□注意：リクライニングレバーを握るとガスシリンダーの伸びようとする力により起きてきますが、この力はご使用者の体重が掛かった場合でも、介助者が簡単に操作できるようにするためのものです。

リクライニングの操作方法 □注意：本シャワーキャリーは、浴槽につけての使用はできません。

全キャスターをロックし、ハンドルパイプに手をかけ、リクライニングレバーを握った状態で、ハンドルパイプに少し力をかけ、ゆっくりと上げ下げして下さい。リクライニングレバーを放すと固定します。

(注意：リクライニング操作中、ご使用者の体重により、ゆっくり起きあがる場合とゆっくり下がる場合がありますが、このような場合は体重を利用し操作して下さい。又、空車の場合は、背が起こせない場合は、片膝を座面に置き、レバーを握り、背を起こしてください。)

□警告：キャスターのロックを掛けて下さい。(後輪直進ガイドご利用可)

□警告：安全ベルトはリクライニングすると、少し締まりますので、必ず少しゆるめに装着して下さい。

□警告：手や足、身体を挟まないようご注意ください。

□警告：リクライニング中は、肘や手を肘かけより動かさないで下さい。

□警告：リクライニング中は、バランス等に十分ご注意ください。

□注意：リクライニング中は、ステップに正しく足をのせてご使用下さい。

□注意：リクライニング中、その他の操作はしないで下さい。



肘かけは、体型や状態に合わせて高さ調節し、ご使用者の肘から手を、肘かけに軽くのせ、安全にリクライニングできる状態をつくり、操作して下さい。

乗り降りについて □警告：必ず介助者がついて、ご使用者の安全を確認しながら、乗り降りして下さい。

□横から乗る場合（各部操作について参照）

1. 背もたれを最も起した状態で、キャスターの内2ヶ所ロックを掛けて下さい。
2. 乗る側の肘かけを下ろし、ご使用者の安全を確認しながら横座りで乗り込み向きを変え、両足をステップにそろえて置き、背中を背もたれにもたれ掛け、安全を確認しながら肘かけを上げて下さい。
3. 安定した姿勢をとり、安全ベルトを掛けて下さい。

□前から乗る場合（各部操作について参照）

1. 背もたれを最も起した状態で、キャスターの内2ヶ所ロックを掛けて下さい。
2. 左右肘かけを上げた状態で、ステップのフットプレートを左右に上げ、ご使用者の安全を確認しながら、イスに座る要領で乗り込み、フットプレートを下げ両足をステップにそろえて置き、背中を背もたれにもたれ掛けます。
3. 安定した姿勢をとり、安全ベルトを掛けて下さい。

□降りる場合（各部操作について参照）

1. 背もたれを最も起した状態で、キャスターの内2ヶ所ロックを掛けて下さい。
2. 乗る場合と逆の手順で、ご使用者の安全を確認しながら降りて下さい。

警告：乗り降りは背もたれを最も起し、必ずキャスターの内2ヶ所ロックが掛かった状態で行って下さい。

□注意：乗り降り中のバランス等に十分ご注意下さい。

メッシュシートについて お手入れ方法は、P.10「メッシュシート部のお手入れ方法」をご覧ください。

●本商品のオレンジのメッシュシート部は、取り外してお手入れできます。

ヘッドレスト 底面がマジックテープになっていますので、マジックテープをはがし、ヘッドレストを上方向に少しずつ、ずらして取り外します。はめる場合は取り外しと反対の要領ではめて下さい。

背もたれ(メッシュ部) 裏面がマジックテープになっていますので、マジックテープをはがし取り外します。はめる場合は取り外しと反対の要領ではめ、マジックテープをしっかり留めて下さい。

ステップ手前(メッシュ部) 裏面がマジックテープになっていますので、マジックテープをはがし取り外します。はめる場合は取り外しと反対の要領ではめ、マジックテープをしっかり留めて下さい。



乗り降りについて □警告：必ず介助者がついて、ご使用者の安全を確認しながら、乗り降りして下さい。

□横から乗る場合（各部操作について参照）

1. 背もたれを最も起した状態で、キャスターの内2ヶ所ロックを掛けて下さい。
2. 乗る側の肘かけを下ろし、ご使用者の安全を確認しながら横座りで乗り込み向きを変え、両足をステップにそろえて置き、背中を背もたれにもたれ掛け、安全を確認しながら肘かけを上げて下さい。
3. 安定した姿勢をとり、安全ベルトを掛けて下さい。

□前から乗る場合（各部操作について参照）

1. 背もたれを最も起した状態で、キャスターの内2ヶ所ロックを掛けて下さい。
2. 左右肘かけとレッグガードを上げた状態で、ステップのフットプレートを左右に上げ、ご使用者の安全を確認しながら、イスに座る要領で乗り込み、フットプレートを下げ両足をステップにそろえて置き、背中を背もたれにもたれ掛けます。
3. 安定した姿勢をとり、安全ベルトを掛けて下さい。

□降りる場合（各部操作について参照）

1. 背もたれを最も起した状態で、キャスターの内2ヶ所ロックを掛けて下さい。
2. 乗る場合と逆の手順で、ご使用者の安全を確認しながら降りて下さい。

警告：乗り降りは背もたれを最も起し、必ずキャスターの内2ヶ所ロックが掛かった状態で行って下さい。

□注意：乗り降り中のバランス等に十分ご注意下さい。

メッシュシートについて お手入れ方法は、P.10「メッシュシート部のお手入れ方法」をご覧ください。

●本商品のオレンジのメッシュシート部は、取り外してお手入れできます。

ヘッドレスト 底面がマジックテープになっていますので、マジックテープをはがし、ヘッドレストを上方向に少しずつ、ずらして取り外します。はめる場合は取り外しと反対の要領ではめて下さい。

背もたれ(メッシュ部) 裏面がマジックテープになっていますので、マジックテープをはがし取り外します。はめる場合は取り外しと反対の要領ではめ、マジックテープをしっかり留めて下さい。

ステップ手前(メッシュ部) 裏面がマジックテープになっていますので、マジックテープをはがし取り外します。はめる場合は取り外しと反対の要領ではめ、マジックテープをしっかり留めて下さい。

