

取扱説明書

日常生活にも、介護を必要とされる方にも
転倒による怪我への不安を軽減する

ソルボヒッププロテクター

頸部に巻いて留めるだけ
面ファスナーで素早く簡単に装着!

〈装着方法〉



1 サイズタグが付いている方が裏側になります。外側から回して位置を確認します。



2 面ファスナーは2段階構造になっています。内側の面ファスナー(B面)で仮留めしてください。この時、指フックを使用していただく扱いやすくなります。



3 外側の面ファスナー(A面)を引き、しっかり固定します。※しめ過ぎにご注意ください。




4 最後に、パッドが正しい位置にきているか確認します。上の写真を参考に、パッドの中心部を適正な位置に調整してください。

〈使用上の注意〉


- 装着時間は1日2、3時間から始めて、徐々に増やしてください。
- しめ過ぎには十分注意してください。●就寝中は使用しないでください。
- 衣服の内側に装着する時は、肌着の上から装着することをおすすめします。
- 本品の機能を損なわないために、正しく装着し、ご使用ください。
- 長期間の使用や使用状況によっては、破損する場合があります。破損した場合は速やかに使用を中止してください。
- ソルボパッド(ソルボセイン)を折り曲げたり、もみ洗いはしないでください。破損の原因となります。
- 保管状況等により、ソルボパッドが若干変色する場合がありますが、性能には問題ございません。
- 痛み・かぶれ・かゆみ等の異常を感じた場合は使用を中止し、医師の指示に従ってください。
- 骨折・ねんざ・靭帯損傷など発生直後は使用しないでください。
- 皮膚疾患やゴムなどに対するアレルギー疾患がある場合は使用しないでください。
- 本品は治療用ではありません。効果には個人差があります。
- 妊婦のご使用はお避けください。●使用目的以外には使用しないでください。

☆トラブルが発生した場合は、すぐに医師の指示に従ってください。

〈各部名称〉

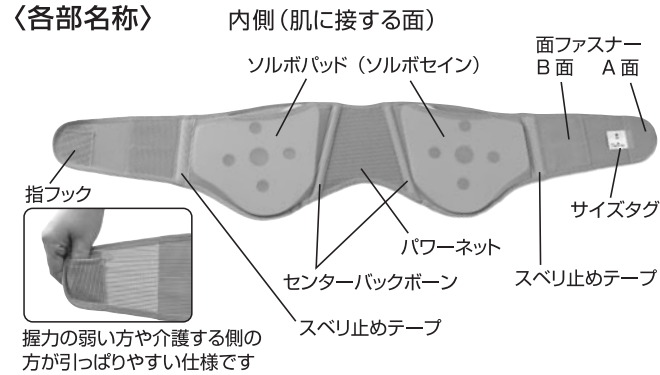

〈パッド位置〉

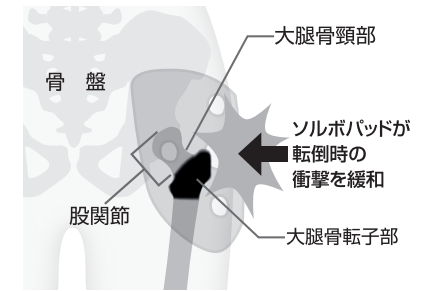

〈装着図〉 前面



お手入れの方法

- お洗濯の際は必ずソルボパッドを取り外してください。破損の原因になります。中性洗剤を使用し、ぬるま湯で押し洗いしてください。洗剤を十分にすすぎ落としてから、絞らずにタオル等で軽く水気を取って、陰干ししてください。
- 乾燥機の使用はお避けください。
- 洗濯の際、色物と一緒に洗わないでください。色が染まる場合があります。





適応サイズ(ヒップ周り)

S	68~78cm
M	78~88cm
L	88~98cm
2L	98~108cm

カラー／ページ

- サイズの選び方
ヒップ周りを計測します。
※計測値が重なる場合は大きめのサイズをお選びください。

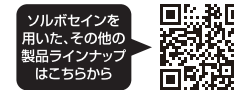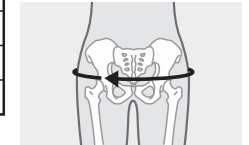

#96093



製造元：三進興産株式会社
東京 TEL03(5338)8590 FAX03(5338)8599
大阪 TEL06(4707)2371 FAX06(4707)2399
<https://www.sorbo-japan.com/>

■品名 ソルボヒッププロテクター
■品質 本体：ナイロン・ポリウレタン
パッド：ポリウレタン樹脂(ソルボセイン)

日本製
MADE IN JAPAN