


## ストレッチ防水カバー

### 洗濯OK!!

洗濯で簡単に汚れが落とせるので、常に清潔な状態でご使用いただけます。


### 防水加工

ポリエステルスモース生地に防水加工を行い、汗・尿・水を通しにくく、中パッドへの進入を防ぎます。

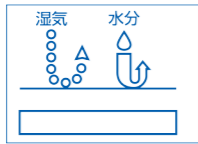

### すべり止め加工

カバーの底面に、すべり止めドット加工を施しています。寝返りを打ってもズレず、車イスでも安心です。

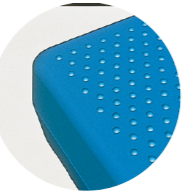

### 伸縮生地

ストレッチ性があり、体型によくなじみます。

## 使い勝手の良い コンパクト設計 レギュラータイプ

体圧のかかるどんな場所でも  
お使いになれます。

サイズ 40×40cm  
厚さ 25mm


3層構造パッドが体圧を分散!!

体・圧・分・散

# ソルボ健康マット

わずか25mmの厚さで体圧を分散。  
当たりがソフトで、痛くない。

寝返り等姿勢を変えることが困難な時、長時間圧迫された場所が、血行不良を起こして床ズレを起こします。ソルボ健康マットは、わずか厚さ25ミリの薄型3層構造で、体圧を分散し、トラブルをやわらげます。また、肌にやさしい適度なクッション性と滑り止め加工で、長時間の使用にも快適性を保ちます。

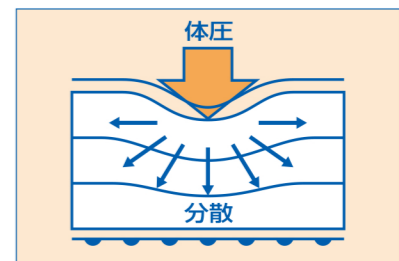

## 低反発フォーム

上:(10mm)、下:(5mm)に低反発ポリウレタンフォームを使用。体の曲面に合わせて圧迫感なくフィットします。



## 人工筋肉「ソルボセイン」



圧力分散性、および衝撃吸収性に優れた素材として高い評価を得ている「ソルボセイン」を10mmのシートにしています。

## 体圧分布の比較

未使用時と比べ、「ソルボ健康マット」使用時には体圧のかかる面積が広がり、外側のブルーの部分が濃くなっていることがわかります。これは体の突起部などに集中していた体圧が広く分散されていることを示しています。



## 1個でもまた複数でも、様々な使い方が可能です。

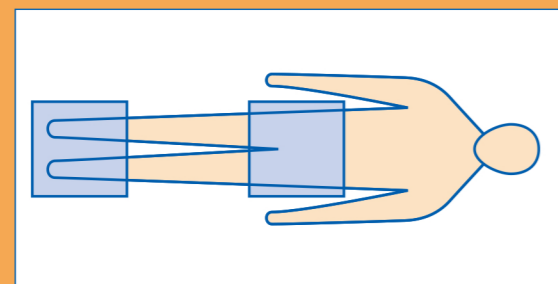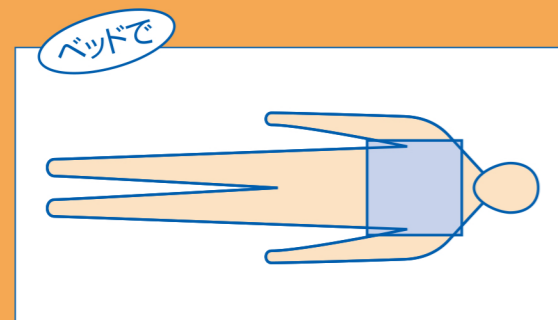


- 車イスを長時間ご利用になる方
- 寝たきりで床ズレにお悩みの方
- 手術後のケアで安静が必要の方




- 長時間座っていて疲れを感じる方
- 痔のために着座姿勢が辛い方

## SORBOTHANE からだを守る人工筋肉「ソルボセイン」


人間の筋肉は衝撃に対して素早く変形し、ゆっくり復元して衝撃を吸収し、圧力も分散します。「ソルボセイン」は、その筋肉の特性をもった特殊な衝撃吸収素材です。※人間の筋肉そのものを代替するものではありません。

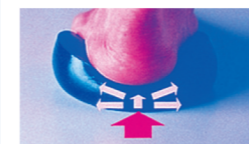

**ソルボセイン**  
圧力を均一に分散、あたりが非常にソフトで、下からの衝撃も感じません。

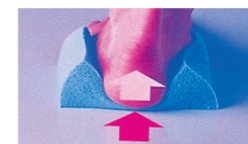

**スポンジ**  
フワッとしているだけで、圧力は分散されずにつぶれてしまい、あたりを感じます。

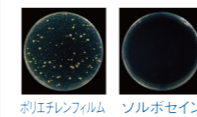

**抗菌衛生** ソルボセインは抗菌性に優れ、バクテリア等の菌の増殖を抑える衛生的な素材です。  
(一般財団法人カケンテストセンター調べ 抗菌性試験 JIS Z2801に基づく)

**衝撃吸収** **圧力分散**

### 使用上のご注意

- 必ず、SORBOTHANEマークの付いている面を上にご使用下さい。
- 中パッドには、使用目的以外で大きな力をかけたり折り曲げなどはしないで下さい。破損の原因となります。
- 本体内部のパッドが変色する場合がありますが、性能上の問題はありません。(直射日光はさけて下さい。)
- 中パッドが汚れた場合、中性洗剤を薄めたものでふき取り、日陰で自然乾燥させて下さい。
- カバーが汚れた場合は、パッドから取り外し、カバーのみを手洗いして下さい。その後自然乾燥(陰干し)させて下さい。



※洗濯時のもみ洗いはおさげください。

規格/重量: 1.5kg  
サイズ: (約)幅400mm × 奥行400mm × 厚さ25mm  
品質表示/素材: ポリウレタン樹脂(ソルボセイン・低反発フォーム)  
カバー: ポリエステル

MADE IN JAPAN  
日本製

ソルボ® ソルボセイン®は三進興産(株)の登録商標です。



## 研究開発にご協力いただいたおふたり。



ソルボセインは体圧分散に非常に役に立つ素材で、その上、取り扱いがラクで安価なのが特長。臨床的にも十分効果が期待できます。

内閣府認証NPO オーソティックスソサエティ 理事長  
医学博士 内田俊彦先生



イスやベッドのクッション材は人間の筋肉に近い特性を持つことが大切。このマットにはそれがあり、体重をうまく分散させています。

上野研究室 博士(工学) 認定人間工学専門家  
上野義雪先生

製造元 三進興産株式会社

<http://www.sorbo-japan.com/>

東京/東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー 〒169-0074 TEL03(5338)8590 FAX03(5338)8599  
大阪/大阪市北区中之島2-2-7 中之島セントラルタワー23F 〒530-0005 TEL06(4707)2371 FAX06(4707)2399