

動きやすく、2通りに使えるスリム設計  
ソルボ楽らく腰ガード **スリム**

薄型  
メッシュ

動きを妨げない

優れたサポート力

DAILY SUPPORT

長時間快適着用

動きと固定のベストバランス!

圧迫固定して、腰の安定を保ちながら体を動かすことで、筋力低下を防ぎ腰のトラブルを軽減します。

腰のトラブル対策サポーター

腹圧を高める

腹・背筋をサポートし、腹腔圧力を高めることで腰椎をしっかり支えます。

背屈を制限する

背屈を抑え、背骨を自然なS字様に保ち、腰椎へのストレスを軽減します。

仙腸関節を固定する

仙腸関節や腰椎を固定圧迫することで腰を安定させ、ゆがみを整えるとともに動きやすくします。

通常使用



腰椎を支え  
動きをサポート

骨盤補整



骨盤を固定し  
歪みを補整

ツインの補助ゴム

本体ベルトを締めてから、補助ゴムで締め具合を自由に調節できるので、装着簡単・調節自在。

面ファスナー

面ファスナー

スベリ止めテープ  
ズレ落ち・ズレ上がり防止

パワーネット、特殊メッシュ

体にピッタリフィットし、激しい動きにも追従します。通気性が良く、ムレにくくさわやか。

軟質ボーン

腰の両脇と背中をしっかりと支えます。

SORBOTHANE からだを守る人工筋肉「ソルボセイン」

人間の筋肉は衝撃に対して素早く変形し、ゆっくり復元して衝撃を吸収し、圧力も分散します。

「ソルボセイン」は、その筋肉の特性をもった特殊な衝撃吸収素材です。※人間の筋肉そのものを代替するものではありません。

衝撃吸収 圧力分散



ソルボセイン  
圧力を均一に分散、あたりが非常にソフトで、下からの衝撃も感じません。



スポンジ  
フワッとしているだけで、圧力は分散されずにつぶれてしまい、あたりを感じます。

衝撃吸収素材「ソルボセイン」

ソルボセインをボーンの内側に使用。ボーンの体への当たりをソフトにし、長時間の着用を楽にしました。

装着方法




従来のコルセットのように腰椎を包むように巻きます。その際、4本のボーンのカーブが腰にフィットするよう、位置を合わせます。




左手で押さえ、右手で面ファスナーの端を少し引っ張りながら...



面ファスナーを固定し、取り付けます。

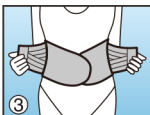

ツインの補助ゴムを腰に沿って引っ張り、本体のベルトに取り付けます。これにより腰椎と背骨を固定し、安眠に保ちます。

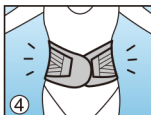

最後にベルトがきつくないか、良くフィットしたかを確認し、微調整をします。

※トラブルが発生した場合は、すぐに専門医にご相談ください。