

ジアワイパー0.1

次亜塩素酸ナトリウム0.1%の環境清拭用ワイパー

70枚入

次亜塩素酸
ナトリウム0.1%
調製済



専用液



不織布ボトル



調製済専用液を注ぐだけ

パッケージの中に
2つのボトルが
入っています



取出口が大きく開く
交換キャップ



取出口が横に広くなり広げやすい
状態でタオルが取り出せます

成分:次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム、その他添加剤(界面活性剤等)

用途

- 人の手が触れやすい高頻度接触面の除菌
テーブルやドアノブ・ベッドサイドの除菌
- 汚染された環境表面の清拭
トイレなど汚物が付着した箇所など

使用方法

1



手袋、マスク、ゴーグル、
ガウン(エプロン)等を
着用してください。

2



箱から
専用液と不織布ボトルを
取り出してください。

3



不織布ボトルのフタを外して
内側のアルミフィルムをはがし、
専用液全量をムラがないよう
に注ぎます。

4



フタをしっかりと閉め、不織布を
斜めに引き出してご使用ください。
※水色キャップに専用液の含浸日を
記入してご使用ください。

特長

ポイント ① 専用液は調製済です。


希釈作業による濃度間違いリスクがありません。

ポイント ② 専用液を注ぐだけで、すぐに使えます。

濃度調製する手間が削減でき、いつでもすぐに使えます。

ポイント ③ 専用液含浸後4週間は有効塩素濃度1000ppm以上を維持できます。※

専用液を含浸した日から2週間を目安にお使いください。使用期限は製造より2年です。

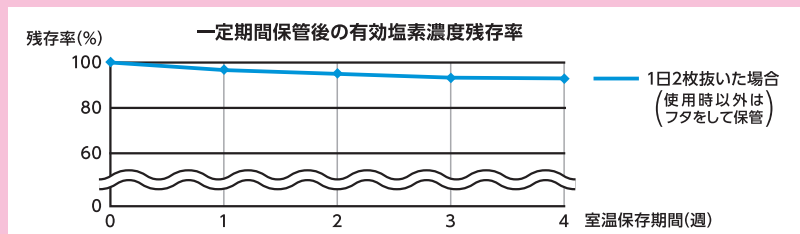

専用液含浸4週間後でも有効塩素濃度1000ppmを維持していました。

※当社実験室内での試験結果によります。(室温)

キャップ

不織布取出し口の中央凸部を表から押し込むと片側が下がり、不織布を通した後、取出し口を裏から押し戻すと不織布が挟まります。取出し口が横に広くなり広げやすい状態で不織布が取り出せます。



参考資料

1. ノロウイルス発生時

厚生労働省のQ&Aでは、感染者が発生した場合、次亜塩素酸ナトリウム等を使用するように記載されています。

※参考資料：厚生労働省 ノロウイルスに関するQ&A

2. 透析

透析終了後には、ベッド周辺の環境表面に付着した有機物や汚れを除去し、清拭消毒することが推奨されております。その消毒薬の1つとして次亜塩素酸ナトリウムが紹介されております。

※参考資料：透析施設における標準的な透析操作と感染予防に関するガイドライン(六訂版)

- 【使用上の注意】
- ◆酸性の薬剤と混ぜると有毒ガスが発生しますので、他の薬剤を絶対に混ぜないでください。
 - ◆使用する時は、使い捨て手袋、マスク、ゴーグル、ガウン(エプロン)などを着用してください。
 - ◆また、液ハネ、液ダレをしないように不織布ボトルはなるべく傾けずにご使用ください。
 - ◆同一梱包の専用液以外は使用しないでください。不織布への浸透性が悪くなり、まんべんなく含浸しないことがあります。
 - ◆ご使用時には必ず換気をよくしてお使いください。
 - ◆この製品はトイレに流せません。
 - ◆乾燥を防ぐため、使用後はフタをしっかり閉め、できるだけ早く使用してください。
 - ◆色物繊維、樹脂やゴム、皮革等、又は材質が不明なものは、変色・変質する恐れがあるため、目立たない所で確かめてから使用してください。
 - ◆他容器への入れ替え(誤用の原因や品質が変わる)、使用中の継ぎ足しや、使用後容器の再利用はしないでください。
 - ◆液が目や皮膚、衣類につかないように注意してください。
 - ◆ステンレス以外の金属は、材質劣化を起こす場合がありますので、使用しないでください。
 - ◆高温、多湿および直射日光の当たる場所を避け、清潔な場所に保管してください。
 - ◆廃棄時には酸性タイプの製品と混ぜないように注意してください。
 - ◆人体には使用しないでください。
 - ◆小児の手の届かないところに保管してください。

商品名・規格	寸法 高さ×幅×奥行(mm)	重量	希望小売 価格	梱 入数	品番	JANコード	ITFコード
ジアワイパー0.1 70枚入 基布サイズ 140×250mm 次亜塩素酸ナトリウム 350mL	単品 192×164×112	685g	オープン 価格	6	42640	4 987603 426405	梱 24987603426409
	梱 210×515×245	4.6kg					

●お問い合わせは

 白十字株式会社

〒171-8552 東京都豊島区高田3-23-12

商品情報はこちら

25410-M01

