



— ぴったりトロミがつくカップ —



- スプーンが無くてもこれひとつでトロミがつけられます。
- フタの内側でトロミ剤が量れ、そのままカップに入れられます。
- フタのジャバラが膨らむので、安全に90℃までの飲み物にトロミがつけられます。
- シェイクするだけで、ダマや溶け残りがほとんどありません。
- フタを外せば、そのまま飲むことができます。



簡単トロミづけ

使い方の動画は  
こちらから



# ポイント

POINT

圧力を逃がす  
ジャバラ

トロミ剤計量部と  
ロックがついたフタ

持ちやすい  
取っ手

見やすい文字


倒れにくい  
底形状



通気孔

計量部

ジャバラ

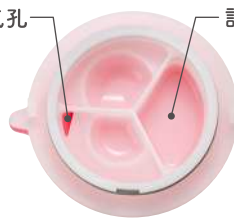

組み合わせて1回で量れるのは、  
2.5ml 5ml 7.5ml 10ml  
12.5ml 15ml 17.5ml です。

熱いお茶などの飲み物を  
入れシェイクすると段階的  
に膨らみます。

3色から選べる  
カラーバリエーション

チェリー  
プロッサム

カナリア  
イエロー

チョコレート  
ブラウン



トロミちゃん

※商品イラストはイメージです。

# 使い方

HOW TO USE

1



## お茶などの 飲み物を量る

カップにお茶などの飲み物  
(温度は90℃まで)を必要量注い  
てください。

2



## トロミ剤を量る

フタのジャバラを完全に折り  
畳んだ状態で計量部に上にして、  
トロミ剤を量ります。


3



## フタを締める

カップにフタを押し込み、  
回転させて、ロックしてください。

4

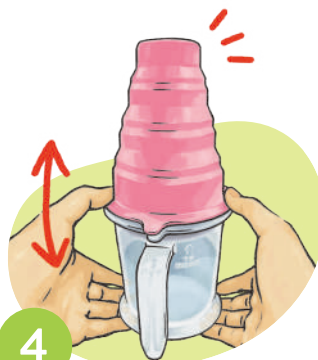

## 容器を振る

3〜5秒間シェイクしてトロミ剤  
をよく溶かしてください。  
飲み物の温度によりジャバラが  
段階的に膨らみます。

5

## 飲む

トロミのついたお茶などの飲み物  
の出来上がり。フタを外してお飲  
みください。取っ手の隙間に手を差し  
込むこともできます。

シェイクすることで  
ダマや溶け残りが  
発生しにくいよ！



トロミちゃん

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 商 品 名   | ぴったりトロミがつくカップ                      |
| カップ容量   | 300ml                              |
| サ イ ズ   | W118×D94×H126mm (拡張時218mm)         |
| 材 質     | フタ、カップ：ポリプロピレン製<br>ジャバラ、パッキン：シリコン製 |
| 耐 熱 温 度 | 100℃                               |

特許出願中

●ご不明な点、ご質問などありましたら、下記までお問い合わせください。

日本 山村硝子株式会社 ファーマキット事業グループ  
〒160-0023 東京都新宿区西新宿 6-14-1 新宿グリーンタワービル20階

MAIL [pharmakit@yamamura.co.jp](mailto:pharmakit@yamamura.co.jp)

TEL 03-3349-7252 [受付時間]  
10:00~17:00 (土日祝日を除く)

日本 山村硝子株式会社



## 【使用上の注意】

●火の側に置かないでください。●冷凍庫に入れて使用すると破損する恐れがあります。●電子レンジで使用しないでください。●高温になる食洗機には入れないでください。●90℃を超える温度での使用はお控えください。変形や破損の原因になります。●使用前の容器は室温程度で使用ください。●使用前にジャバラを縮め、フタにジャバラがしっかり入っているか確認してください。●フタを締める際はしっかり最後まで押し込みながら、ロック位置までまわしてください。●洗浄時は必ずジャバラを外して、ジャバラ部内面もよく洗ってください。●固いたわし等で洗うと製品に傷がつくことがあるので、柔らかいスポンジ等で洗ってください。●パッキン、ジャバラに亀裂や穴などが見られた場合は使用を中止してください。●中身に液体が入った状態で運ばないでください。

## 「Bi-AMPS」とは

Bi-AMPSとは、(独)国立病院機構 大阪医療センターが運営する、次世代医療機器開発連携拠点の名称です。  
Bi-AMPSは、(独)国立病院機構の登録商標です。(商標登録 第6460310号)

