

心電図電極用ディスプレイ

GELECT

ゲレクトS

胸部用

四肢用

人に優しい

クリームのないソフトタイプの
心電図電極用ディスプレイです。



心電図検査を「ちょっと快適」にする脇役アイテム



患者さんにとって…

- クリーム使用時に比べ、べたつきなどの不快感がありません

医師・検査技師・看護師にとって…

- 繰り返し使用可能です
- 拭き取り作業がいらず、検査時間を短縮します

GELECT

胸部用

やわらかいのに破れにくく
装着しやすい



① アルミシートを指で押し破りパッドを取り出します。



② パッドを引っ張りながら電極に装着してください。



③ 装着にすれのないことを確認してご使用ください。



GELECT

四肢用

皮膚側がべたつかず
検査後も快適



① 白い紙のセパレーターをはがします。



② 紙のセパレーターをはがした方を電極板に圧着します。



③ 両サイドを折り曲げ固定してから、透明プラスチックセパレーターをはがしてご使用ください。



成分 ウレタン樹脂、塩化ナトリウム、ジヨードメチル-P-トリルスルホン

品名	容量	JANコード	本体価格 (税別)	梱包 単位	個箱サイズ 梱包サイズ
ゲレクトS 胸部用	24パック入 (1パック6個入 φ26mm)	4987382036260	10,500円	20箱	W155 × D117 × H180mm W628 × D328 × H390mm
	100パック入 (1パック6個入 φ26mm)	4987382036277	32,000円	6箱	W385 × D226 × H150mm W486 × D408 × H485mm

成分 ポリアクリル系架橋体、塩化ナトリウム、安息香酸ナトリウム、グリセリン

品名	容量	JANコード	本体価格 (税別)	梱包 単位	個箱サイズ 梱包サイズ
ゲレクトS 四肢用	25パック入 (1パック4枚入 48×32mm)	4987382035911	6,900円	32箱	W152 × D 66 × H 84mm W322 × D290 × H380mm
	100パック入 (1パック4枚入 48×32mm)	4987382035904	21,600円	8箱	W267 × D151 × H 84mm W328 × D283 × H380mm

使用上の注意

- 本製品は心電図測定のために電極に装着して使用するものです。それ以外の用途には使用しないでください。
- 感染の恐れがありますので、明らかに皮膚疾患がある患者さんに使用した場合には、新しいものと交換してください。
- 衛生上、毎日交換してください。
- 使用回数により基線の動揺が発生したら新しいものと交換してください。
- 皮膚に発疹、発赤、かゆみ、かぶれ等の症状があらわれた場合には、使用をおやめください。
- 本来の特性を維持するために、胸部用は30℃以内、四肢用は35℃以内の暗所で保管してください。
- 小児用等のサイズの合わない電極もありますのでご注意ください。
- アルミシートやアルミパックが傷つくと、パッドが乾燥して収縮します。

誤った取扱いをされますと、正確な心電図計測が出来なくなる恐れがあります。説明書きをよく読み、正しくお使いください。

発売元

ケンツメディコ株式会社

〒367-0206 埼玉県本庄市児玉町共栄552番地1
TEL: 0495-71-1001 FAX: 0495-72-6716
ホームページ <https://www.kenzmedico.co.jp>