

MOGU®

力を入れずに、書ける・持てる！

ペン&カトラリー
グリップ

PEN & CUTLERY GRIP

<使用上のご注意>

●破損の原因になりますので、過度の荷重や衝撃を加えないでください。
●ストーブやタバコの火等、熱源を近づけないでください。特に裸火にご注意ください。溶けたり、燃え出す場合があります。
●万一、ビーズがこぼれた場合、お子様やペットの目、口、耳、鼻等に入らないようにご注意ください。
●目に入った場合は、清浄な流水で洗浄し、異常を感じた時は直ちに眼科医の手当てを受けてください。
●ビーズは危険な物質ではありませんので飲み込んだ場合消化されずに排泄されますが、すぐに吐き出し、口の中を洗浄してください。
●その他異常を感じた場合は、直ちに専門医の手当てを受けてください。

<お手入れ方法>

●本体は洗濯できません。汚れが気になる場合は、水または中性洗剤で部分洗いにとめてください（漂白剤の使用は避けてください）。
●しっかりと自然乾燥させてください（加熱乾燥はしないでください）。
●脱水等、洗濯機は絶対に使用しないでください。破損等によってビーズが漏れた場合、洗濯機の故障の原因となる恐れがあります。

⚠ 火気厳禁 検針済

中国製

株式会社 MOGU

〒673-1122
兵庫県三木市吉川町西奥1173
www.mogus.jp

「MOGU®」および「パウダービーズ®」は
株式会社MOGUの登録商標です



こんな
方に！



軽く握るだけで
手にフィット！
指に力を入れずに
書く事ができます
カトラリーのグリップ
としても使用できます



- ✓ 長時間筆記をされる方
- ✓ 握力が弱い方
- ✓ 要介護者のリハビリや筆談用に
- ✓ 腱鞘炎で握り続けることがつらい方
- ✓ まだうまく握れない小さなお子様
- ✓ ペンの握り方を矯正したい方

指に力を入れずに前の膨らみ部分を握り込むことで
正しい持ち方ができます

さまざまな握り方ができる
ユニバーサルデザイン



パウダービーズ®と伸縮性生地によって構成されたMOGU®
ペン&カトラリーグリップは、指への圧力を最小限に抑え、自然と
握りやすい形状へ変化します。これにより、指とグリップが広い
面積で触れ合うため、強く握らなくても持ち続けられます。

市販の
筆記具
に対応



習字筆や
絵筆にも
使用できます



カトラリー
にも使用
できます



ノック
できます
※



鉛筆・シャープペン・ボールペン・万年筆 等の他
習字筆や絵筆・カトラリーにも使えます

※スライドノック式はご使用できません。

差し込んで装着握りが軽くなります



① ペンを差し込む



② 先端部のビーズを移動させて
チャックを閉める

※先端部にビーズが多いと、閉めにくい原因になります。




いつも使っているペンをモグ®ペン&カトラリーグリップに差し込むことで、接触面積が広がり軽く握れるようになります。また、筆記具だけでなく、グリップとしてカトラリーにも使用できます。

フィット性を調節できます



前の膨らみの大きさを変えることで
グリップ感を自由に調節できます

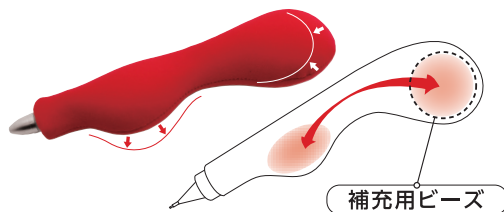

補充ビーズを前や後ろに移動させることで
膨らみの大きさが変えられます

グリップ以外にケースとしても活用できます



① ペンを差し込む



② チャックを閉める

※新しい鉛筆など長い筆記具は、先が収まりません。

バッグにいつも入っているお気に入りのペンをキズから守り 見つけやすくサッと取り出せる

MOGU®ペン&カトラリーグリップの内部には、空気を含んだ
極小ビーズ(パウダービーズ®)が入っています。とても軽く、
ペンに直接衝撃が伝わりません。



① 取り出す



② チャックをはずして
ペン先を出す



③ チャックを閉じて
使用する



【サイズ】 約横4.5cm×縦14cm×高5cm 【組成】 ナイロン85%、ポリウレタン15% / 中材: パウダービーズ®(発泡ポリスチレン)



パウダービーズ® まるでパウダーのような超微粒子ビーズ

MOGU®ペン&カトラリーグリップの中材には、発泡ポリスチレン製ビーズが使われています。今までに感じたことのないような新しい感覚が特長の発泡ビーズ。直径1mm以下の超微粒子ビーズは流動性に優れ、心地よく身体になじみます。