

シングルユース汚物処理システム マセレーター クアトロ Quattro



HAIGH

感染対策

看護師の
間接業務
軽減

経済効果
の検証

汚物容器のワンウェイ廃棄による、
交差感染の防止。
直接看護時間の創出。
光熱費等のトータルコストメリット。

尿器



立てても
自立可能です

便器



ボール



差込
便器



尿取り
ハット



膿盆



深型
便器



深型
ボール



大容量＆コンパクト設計

人間工学に基づいた低位置投入口。
(高さ:784mm)

静音設計＆「ナイトモード」

スタンダード運転時は約60db、ナイトモード
運転時は、わずか約54dbを実現。
就寝時間に合わせて時間設定が可能です。

表面抗菌コーティング

清掃しやすい凹凸の少ないデザイン。

超微細マセレーションシステム

5mm以下の超微細に粉碎された専用パルプ
容器はスムーズに下水へ排水されます。

ご使用方法



フタの開閉はハンズフリーです。
フットペダルを踏み、フタを開けます。
汚物ごと容器を投入します。



注意

※手で閉めないでください。
(故障の原因になります)



フットペダルを踏み、フタを閉めます。
同時に運転が開始されます。



マセレーターQUATTRO (クアトロ)

コード	①24-8065-00□□
定価 (税抜)	¥1,750,000
製品サイズ	W411×D524×H908mm
重量	約58.5kg
1回処理数	汚物処理容器最大4コ

※ご注文の際には、□□にサブコードをご指定ください。

〔サブコード/定格周波数〕

01	50Hz	02	60Hz
----	------	----	------

- 市場で最も微細に粉碎可能なマセレーターです。専用パルプ容器を5mm以下に粉碎し、スムーズな排水を実現します。
- 静音設計 & クアトロ独自の『ナイトモード (約54db)』を搭載しています。



HAIGH セーフガード24 (マセレーター用洗剤)

コード	②24-8668-00
定価 (税抜)	¥32,200
品番	HAI-02-05-5-2
容量	5L

【成分】
陽イオン性界面活性剤 (ジデシルジメチルアンモニウムクロライド ≤ 0.4%)

日本製



マツヨシ シングルユース再生パルプ汚物処理容器

コード	③ 25-4132-00	④ 25-4132-01	⑤ 25-4132-02	⑥ 25-4132-03	⑦ 25-4132-04
定価 (税抜)	¥5,500	¥17,150	¥8,250	¥8,450	¥6,200
品名	シングルユース尿器	シングルユース便器	シングルユースボール	シングルユース差込便器	シングルユース尿取りハット
品番	MY-JSU01	MY-JSU02	MY-JSU03	MY-JSU04	MY-JSU05
製品サイズ	約 W115 × D232 × H115mm	約 W295 × D358 × H86mm	約 W240 × D222 × H84mm	約 W304 × D346 × H75mm	約 W326 × D206 × H99mm
容量	(満水時) 900ml	(満水時) 2000ml	(満水時) 1000ml	(満水時) 1300ml	(満水時) 1000ml (目盛りは 800ml まで)
重量	約 50g	約 60g	約 30g	約 45g	約 35g
入数	40 コ	100 コ	160 コ	80 コ	60 コ
材質	再生パルプ				

コード	⑧ 25-4132-05	⑨ 25-4132-06	⑩ 25-4132-07	⑪ 24-8661-08	⑫ 25-4123-00	⑬ 25-4124-00
定価 (税抜)	¥15,500	¥9,700	¥8,000	¥1,500	¥11,000	¥11,600
品名	シングルユース膿盆	シングルユース深型便器	シングルユース深型ボール	シングルユース深型ボール用フタ	シングルユース便器用フタ	シングルユース深型便器用フタ
品番	MY-JSU06	MY-JSU07	MY-JSU08	MY-JSU09	MY-JSU02CV	MY-JSU07CV
製品サイズ	約 W258 × D151 × H48mm	約 W295 × D358 × H136mm	約 W295 × D221 × H106mm	約 238 × 170mm	約 291 × 174mm	約 297 × 229mm
容量	(満水時) 700ml	(満水時) 3500ml	(満水時) 2500ml (目盛りは 2000ml まで)	—	—	—
重量	約 20g	約 60g	約 40g	約 2g	約 14g	約 18g
入数	360 コ	50 コ	100 コ	50 コ	250 コ	200 コ
材質	再生パルプ					

紙 ※紙パルプ製容器はリサイクルされた古紙を有効活用しています。※古紙を再利用しているため、色・質・においなどが製造ロットにより異なる場合がございます。

組み合わせて使うとさらに便利に！


	 <p>使用例</p> <p>シングルユース尿器専用の尿器掛けです。</p>	 <p>使用例</p> <p>シングルユース便器・差込便器を収納できます。据置・壁掛兼用。</p>	 <p>使用例</p> <p>シングルユースボールを収納できます。据置・壁掛兼用。</p>	 <p>使用例</p> <p>シングルユース便器を上に乗せて使用するサポーターです。</p>	 <p>使用例</p> <p>シングルユース差込便器を上に乗せて使用するサポーターです。</p>
コード	⑫ 24-8662-00	⑬ 24-8663-00	⑭ 24-8664-00	⑮ 24-8665-00	⑯ 24-8666-00
定価 (税抜)	¥3,600	¥19,500	¥22,400	¥6,900	¥6,900
品名	HAIGH シングルユース尿器用ホルダー	HAIGH シングルユース便器用ラック	HAIGH シングルユースボール用ラック	HAIGH シングルユース便器用サポーター	HAIGH シングルユース差込便器用サポーター
品番	400-063002	400-063003	400-063004	400-063005	400-063006
製品サイズ	W132×D105×H175mm	W340×D400×H790mm	W310×D280×H790mm	W280×D370×H80mm	W290×D460×H80mm
重量	50g	1.05kg	0.95kg	395g	350g
付属品	壁取り付け用ビスセット			—	
通常時在庫情報	通常在庫				

マセレーター クアトロ Quattro

製品仕様

外形寸法	W411×D524×H908mm
装置重量	約58.5kg
電 源	100V 50/60Hz 15A
処理数（ナイトモード）	4個（1個）
運転時間（ナイトモード）	116秒（265秒）
1 運転当たりの水使用量（ナイトモード）	21ℓ（23.5ℓ）
1 運転当たりの電気消費量	0.01Kw（10w）
騒音値（ナイトモード）	約60db（約54db）
蓋の開閉	フットペダル ⇒ 開閉ハンズフリー

寸法図

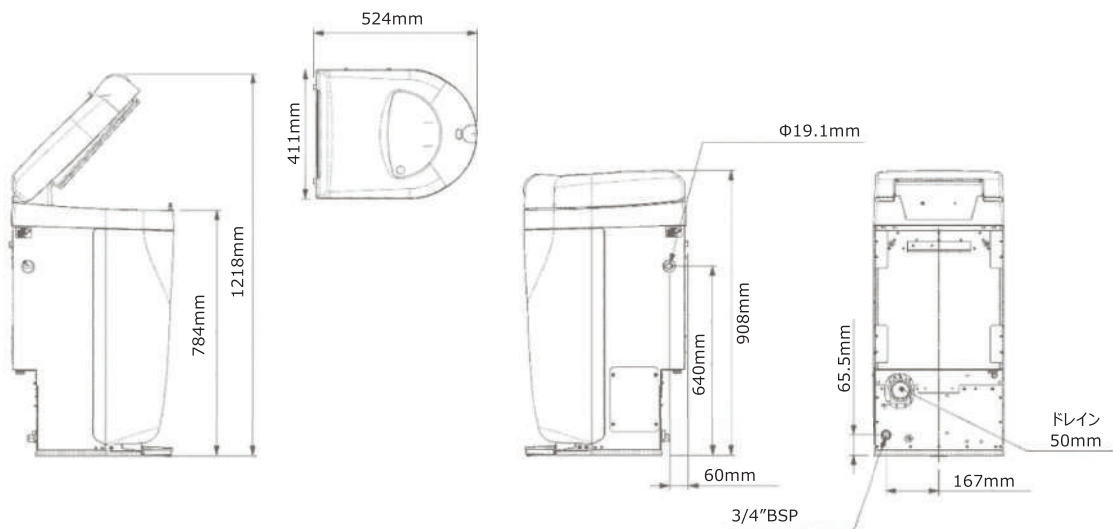

松吉医科器械株式会社

製造元：
英国 The Haigh Engineering
Company Limited

【本社】
〒113-8520 東京都文京区湯島3-14-9 湯島ビル3F

【オフィス】
札幌・仙台・埼玉・東京・名古屋・大阪・広島・福岡

<https://www.matsuyoshi.co.jp>

