

安全・安定・安心の日本製 マツヨシ シングルユース尿取りハット

MADE
IN
JAPAN

日本製上白紙限定のリサイクル素材を使用し、すべて日本国内で製造することで「安全品質」「安定供給」を実現しています。

- リサイクル（再生）されたパルプを利用したシングルユース汚物処理容器です。
- 座って採尿ができるため、動きが不自由な方でも対応が可能です。



清潔で容器の色が白く均一なので
尿の色や性状を観察しやすい！

洋式トイレでの使用例



- ①便座を上げ、尿取りハット ②便座を下ろして挟み込む
を便器に載せる

シングルユース尿取りハット と併用できます。

- ホワイトカラーを基調にしたフレーム
タイプのポータルトイレチェア。
- バケツを外して折りたたみが
できます。

マツヨシ
ポータルトイレチェア（折りたたみ式）

定価（税抜）：¥15,000
カタログコード：25-3262-00
品番：MY-1251

マツヨシ医療総合カタログ2023-2024：P.1224



こんな用途に使用されています。

■尿量の測定（病院や介護施設など）

尿量の記録が必要な患者様の尿量の計測、排尿状態の管理に。
便器に直接置いて尿をキャッチ。清潔で簡単に採尿できます。

■排尿の観察・介助（介護施設や在宅介護など）

高齢者の方や要介護者の方の排尿の様子の確認に。
排尿障害や失禁のある方の排尿パターンの観察に。

使用後の廃棄の仕方

マセレーター
で
粉碎処理
の場合

- ① 患者様へ
使用後

- ② 汚物が入った状態で
マセレーターに投入
（粉碎して下水に流れます）



ゴミ
として
廃棄処理
の場合

- ① 患者様へ
使用後

- ② 汚物をトイレや
汚物槽に廃棄

- ③ 院内の規定に従って
ゴミとして廃棄

MATSUYOSHI

マツヨシ シングルユース尿取りハット



コード	①25-4132-04
定価（税抜）	¥6,200
品番	MY-JSU05
製品サイズ	約 W326×D206×H99mm
容量	（満水時）1000ml （目盛りは800mlまで）
重量	約35g
入数	60コ
材質	再生パルプ
通常時在庫情報	マツヨシ在庫

マツヨシ医療総合カタログ2023-2024：P.169

松吉医科器械株式会社

【本社】

〒113-8520 東京都文京区湯島3-14-9 湯島ビル3F

【オフィス】

札幌・仙台・埼玉・東京・名古屋・大阪・広島・福岡

<https://www.matsuyoshi.co.jp>

