



医療総合カタログ 2026-2027 P.997

マツヨシ(松吉医科器械)

救急カートベーシック3点セット 25-422 8-00 マツヨシ(松吉医科器械) MY-EC01

希望小売価格 : ¥99,000(税抜き)

商品説明

- ポンベ架・IVポール（ガートル棒）・CPRボード（蘇生板）の3点セット付。
- 救急対応をこの一台でまかなえます。
- 引出しの1段目と2段目には、医薬品などの小物類が混ざらないように仕切板が付いています。
- 滑らかな静音キャスターと音の反響を抑える樹脂天板&PVCシートを使用しています。
- 引出しロック機構：全引出しトータルロック
- 本体裏面にある上下2つのフックにCPRボードを取り付けられます。

商品スペック

- カラー：ホワイト
- 製品サイズ：W850×D480×H975mm
- キャスターサイズ：φ100mm
- キャスター仕様：静音・対角ストッパー付き
- 引出し1・2段目(仕切板対応)：W430×D380×H75mm
- 引出し3・4段目：W430×D380×H110mm
- 引出し5段目：W430×D380×H190mm
- 天板：W500×D410mm
- 補助天板：W325×D380mm
- 本体重量：36.5kg
- 材質：本体=ABS樹脂
- 耐荷重：天板：30、引き出し：12、補助天板：5kg
- 個装入数：1台
- 付属品：ポンベ架、IVポール、CPRボード、仕切り板
- 仕切り板：[1・2段目用] 縦横×6枚ずつ、[3・4段目用] 縦横×6枚ずつ、[5段目用] 縦3枚・横2枚付属

(1)引出施錠時・解錠時の注意事項

引出の上部にあるシリンダー鍵で、全ての引出を施錠・解錠する事ができます。

引出が全段奥まで閉まっている事を確認してから、施錠・解錠してください。

いずれかの引き出しが少しでも引き出された状態では正しく施錠できないほか、鍵やロック部分の破損に繋がる恐れがあります。

(2)ストッパー付きキャスターの使用方法（ストッ

バーなし：2個、ストッパーあり：2個)

キャスターのストッパーは、下げるとロック状態に上げるとロック解除状態になります。

(3)ボンベ架の使用方法

本体裏面のボンベ架を引き出し、ボンベを置いてください。

ボンベに合わせてベルトの長さを調節し、バックルを差し込んでしっかりと固定してください。

メーカー品番	: MY-EC01
JANコード	: 4535847038917
カタログコード	: 25-4228-00
マツヨシコード	: 00731503
業事分類	: 業機法対象外

※ PDF出力日 2026/05/30

最新価格・その他情報についてはマツヨシWEBをご確認ください。