



医療総合カタログ 2026-2027 P.661

マツヨシ(松吉医科器械)

スライディングマット・シート 25-4232-00 マツヨシ(松吉医科器械) MY-MB0001

希望小売価格 : ¥39,500(税抜き)

商品説明

- 事故防止や介護負担軽減、腰痛予防を目的として、自立移動ができない患者が、抱きかかえずにスムーズな移乗に折りたたみ式スライディングマットです。
- ロール状シートが回転するので、軽い力で水平に押すだけで、患者が呼吸器や吸引機を使用しているままで目的地まで移乗できます。
- ベッドとストレッチャー・リクライニング車いす、手術台・検査台、シャワートロリーなどに移乗でき、10cmまでの隙間や段差でもスムーズに移乗できます。

商品スペック

- カラー：ブルー
- 製品サイズ：W170×D50×H2cm
- 折りたたみ寸法：W85×D50×H4cm
- 本体重量：2500g
- 材質：PE,EPE,PVC,NYLON
- 耐荷重：150kg
- 滅菌・洗浄・洗濯等の方法・条件：●洗浄方法：
マット：通常は、乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。汚れのひどいときは、布を薄めた中性洗剤に浸して固く絞り、その布で優しく拭きます。さらに、洗剤分を残さないよう、固く絞った布で水拭きします。最後に、直射日光を避けて陰干ししてよく乾かします。
シート：シートは取り外して、60℃以下のぬるま湯で洗えます。その後、直射日光を避けて陰干しをし、よく乾かしてください。●除菌方法：
除菌したいときは、アルコール除菌スプレーを乾いた柔らかい布にスプレーして拭いてください。
※ドライヤー等での急激な乾燥や、アイロンの使用は避けてください。
- 個装数：1台
- 付属品：収納バッグ

メーカー品番 : MY-MB0001
JANコード : 4535847038139
カタログコード : 25-4232-00
マツヨシコード : 00731508
薬事分類 : 薬機法対象外

※ PDF出力日 2026/05/31
最新価格・その他情報についてはマツヨシWEBをご確認ください。

