



ケーブル

ホスピタマットレス 体圧分散マット 23-2406-00 ケーブ CR-286(83X191X8.5CM)

希望小売価格 : ¥51,000(税抜き)

[医療総合カタログ 2026-2027 P.752](#)[医療総合カタログ 2023-2024\(旧号\) P.1239](#)[医療総合カタログ 2022-2023\(旧号\) P.1098](#)

商品説明

- 「低反発」と「高反発」のリバーシブル構造。
- 療養者様の状態やお好みに合わせて使い分けができる「低反発面」と「高反発面」のリバーシブル体圧分散式ベッドマットレス。
- 専用カバーは防水・制菌加工。AG+銀複合系抗菌剤も配合。アルコールや次亜塩素酸ナトリウムによる消毒清拭にも対応します。
- 優れた耐久性。

商品スペック

- カラー：ネイビー
- 製品サイズ：W830×L1910×H85mm
- 本体重量：6kg
- 材質：【本体】低反発ウレタンフォーム(2.0cm)、高反発ウレタンフォーム(6.5cm)、【カバー】ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・制菌・伸縮)
- 滅菌・洗浄・洗濯等の方法・条件：1. 専用カバー
[方法]
 - ・業務用洗濯機による洗浄の場合、水温は40℃以下に設定してください。
 - ・洗濯時の設定は弱水流に設定してください。
 - ・必ず洗濯ネットをご使用ください。
 - ・すぎは十分に行ってください。
 - ・脱水は低速で行ってください。
 - ・乾燥は、乾燥機(60℃推奨)または、風通しの良い場所で日陰吊り干ししてください。(推奨)
- 2. 本体(ウレタンフォーム)
[方法]
 - ・定期的にかバーを取外し、風通しの良い場所で半日程度の日陰干しを行ってください。(推奨)
 - ・シミなどの汚れが付着した場合は、以下の手順を参考にしてください。
- 【カバー】
消毒用エタノール(濃度70%以上)、次亜塩素酸ナトリウム液(1000ppm以下)での清拭可能
- 個装入数：1枚

マツヨシコード : 00864535
薬事分類 : 薬機法対象外

※ PDF出力日 2026/04/12
最新価格・その他情報についてはマツヨシWEBをご確認ください。