



医療総合カタログ 2026-2027 P.753

医療総合カタログ 2023-2024(旧号) P.1241

医療総合カタログ 2022-2023(旧号) P.1099

ケープ

ディンプルマットレス 830 830 体圧分散 マット 23-5513-00 ケープ CR-540(83X 191X12CM)

希望小売価格 : ¥90,000(税抜き)

商品説明

- ディンプル形状がウレタン特有の反力を軽減。
- ディンプル+スリット構造で効果的な体圧分散。
- アクティブフレーム構造で離床・端座位をサポート。

商品スペック

- カラー：グレー
 - 製品サイズ：W830×L1910×H120mm
 - 本体重量：6kg
 - 材質：マット(1層目・2層目)=ラバータッチウレタンフォーム、(2層目サイド・3層目)=高硬度ウレタンフォーム、専用カバー(上面・側面)=ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・制菌・伸縮・防災)、(下面)=ナイロンオックス
 - 滅菌・洗浄・洗濯等の方法・条件：1. 専用カバー
[方法]
 - ・業務用洗濯機による洗浄の場合、水温は40℃以下に設定してください。
 - ・洗濯時の設定は弱水流に設定してください。
 - ・必ず洗濯ネットをご使用ください。
 - ・すぎは十分に行ってください。
 - ・脱水は低速で行ってください。
 - ・乾燥は、乾燥機(60℃推奨)または、風通しの良い場所で日陰吊り干ししてください。(推奨)
 - 2. 本体(ウレタンフォーム)
[方法]
 - ・定期的にかバーを取外し、風通しの良い場所で半日程度の日陰干しを行ってください。(推奨)
 - ・シミなどの汚れが付着した場合は、以下の手順を参考にしてください。
- 【カバー】
消毒用エタノール(濃度70%以上)、次亜塩素酸ナトリウム液(1000ppm以下)での清拭可能
- 個装入数：1枚

メーカー品番 : CR-540(83X191X12CM)
JANコード : 4939810005577
カタログコード : 23-5513-00
マツヨシコード : 00867110
薬事分類 : 薬機法対象外

※ PDF出力日 2026/04/12
最新価格・その他情報についてはマツヨシWEBをご確認ください。

