



 医療総合カタログ **2026-2027 P.750** 

 医療総合カタログ **2023-2024(旧号) P.1236**



 医療総合カタログ **2022-2023(旧号) P.1094**



ケーブ

スモールチェンジ ラグーナ 840 エアマット(褥瘡ケア) 24-4775-00 ケーブ CR-700(840)

希望小売価格 : **¥228,000(税抜き)**

商品説明

- 臨床研究から生まれた新しい自動体位変換機能「スモールチェンジ」搭載。
- 骨盤を中心とした対角線上の小さな体位変換を約15分間隔で行います。
- 「圧切替」×「スモールチェンジ」×「ムレ対策素材」のハイブリッド構造でムレを防止。
- 自動ヘッドアップ対応。停電対策機能付。
- 交換タイプ。

商品スペック

- カラー：グリーン
- 製品サイズ：W840×L1920×H135mm
- 本体重量：8.2kg
- 材質：エアセル／ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌)、ベースマット：三次元構造体 プレスエア－R(制菌)、ヘッドアップセンサ／ABS樹脂、ベースシート／側面：ナイロンオックス 下面：ポリエステルメッシュ すべり止め布付き、専用カバー／ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・透湿・制菌・伸縮・防災)
- 滅菌・洗浄・洗濯等の方法・条件：1. [専用カバー]
 - ・業務用洗濯機による洗浄の場合、水温は40℃以下にしてください。
 - ・お客様のご都合により乾燥機を使用される場合は上限温度にご注意ください。
- ※乾燥上限温度80℃以下に設定してください(60℃推奨)。
- 2. [エアマットレス本体]
 - ・カバーからの水の浸入を防止するため、必ず専用の洗濯栓(別売)をご使用ください。
 - ・エアセルが送風チューブから外れていないことをご確認ください。
 - ・必ず洗濯ネットをご使用ください。
 - ・業務用洗濯機による洗浄の場合、水温は40℃以下にしてください。
- 消費電力：AC100V 50／60Hz(12W)
- 個装入数：1台

カタログコード : 24-4775-00
マツヨシコード : 00875505
薬事分類 : 薬機法対象外

※ PDF出力日 2026/02/25
最新価格・その他情報についてはマツヨシWEBをご確認ください。