



医療総合カタログ 2023-2024(旧号) P.826

医療総合カタログ 2022-2023(旧号) P.756

## NURSE ANGIE

### ネブラーゼディオ用マスク ネブライザー 用オプション 25-2453-12 NURSE ANGI E NEB-02MK(オトナ、ショウニ)

希望小売価格 : ¥990(税抜き)

#### 商品説明

- 24-9999-00用オプション。

#### 商品スペック

- カラー：透明
- 製品サイズ：大人：H137×W106、子供：H96×W91mm
- 大人：137X106mm
- 子供：96X91mm
- 本体重量：65g
- 材質：ポリ塩化ビニル

●滅菌・洗浄・洗濯等の方法・条件：＜洗浄＞吸入が終わったら毎回洗浄を行う。本品を介しての感染症を予防するために、本品を常に清潔に保つこと。

- (1) マウスピース、マスク等を外す。  
メッシュモジュールは取り付けたままにする。
- (2) 薬液カップの蓋を開け、残った薬液を捨てる。  
薬液カップに蒸留水を入れ、蓋を閉めて電源/噴霧ボタンを押して2～3分間噴霧する。
- (3) 電源/噴霧ボタンを押して停止させ、残った蒸留水を捨てる。
- (4) 薬液カップの留め具を押しながら薬液カップを正面側へ押し出しながら外し、蓋を開けて新しい蒸留水で薬液カップの中を良くすすぐ。
- (5) 洗浄が終わったら、医療用ガーゼで水分を拭き取り十分に乾燥させる。  
メッシュモジュール内の振動子(メッシュ)部分は綿棒で触ったり、鋭利な物で突いたりしない。) )
- (5) 本体や薬液カップの表面が汚れた場合は、水または中性洗剤を浸み込ませた柔らかい布を固く絞って拭き取った後、柔らかい布で乾拭きする。
- (6) マウスピース、マスク、キャップを蒸留水で洗い、洗い終わりに蒸留水で十分にすすぎ、医療用ガーゼで拭いて乾燥させる。
- (7) 洗浄、乾燥後は本体、薬液カップ及び付属品を収納ケースに入れて保管する。

#### ＜消毒＞

1週間に一度、または長期間使用していなかった場合に消毒を行う。

- (1) 薬液カップ、メッシュモジュール、マウスピース、マスク、キャップを消毒する場合は、2%の過

酸化水素水、または75%の医療用エタノールに約10分間浸す。

または、2%の過酸化水素水、または75%の医療用エタノールをつけた医療用ガーゼで拭いて消毒する。

(2) 消毒後、全ての部品を蒸留水で洗浄し、清潔で殺菌済の医療用ガーゼで拭いて乾燥させる。

(3) 洗浄、乾燥後は本体、薬液カップ及び付属品を収納ケースに入れて保管する。

●個装入数：1個

メーカー品番	: NEB-02MK(オトナ、ショウニ)
JANコード	: 4983621801637
カタログコード	: 25-2453-12
マツヨシコード	: 00884690
薬事分類	: 薬機法対象外

※ PDF出力日 2026/05/01  
最新価格・その他情報についてはマツヨシWEBをご確認ください。