

# Matsuyoshi Compact Suction Unit



医療機器認証番号 303AABZX00036A01



世界中の医療従事者から信頼を得る「レールダルサクシオンユニットLSU」の技術を搭載

# Matsuyoshi Compact Suction Unit

- マツヨシ コンパクト吸引器 -



- 信頼の「レールダルメディカルジャパン」社製サクシオンユニットを採用
- キャニスターなど消耗品はディスポーザブルで感染対策に適しています
- アルコール使用が可能な専用バッグ付
- 内蔵バッテリー搭載で災害等の停電時にも使用可能
- キャニスターの満杯時、または吸引ユニットの転倒時に吸引を自動停止する安心設計
- 2年間保証(本体のみ)

吸引レベル表示

ワイヤースタンド

吸引器本体

吸引チューブ



← 推奨吸引レベル

キャニスター(800ml)

感染対策に最適な  
ディスポーザブルキャニスター

# ウイルス感染が確認されている患者の吸引に適した仕様

## ■ ディスポーザブルの消耗品を採用

キャニスター、患者側チューブは、ディスポタイプのため、感染リスクが軽減されることにより、使用者を守ることができます。



## ■ アルコール使用が可能な専用バッグ付



ボタン操作もバッグの外側から



収納状態



バッグの外側から溜まった廃液を確認できます

## ■ 内蔵バッテリー搭載で停電時にも使用可能

充電の際はAC/DCアダプターをご使用ください。



バッテリーを本体から外し、オプションの外部充電器を使用することで外部充電が可能です



オプションとしてシガーソケット対応のDCコードも用意しております

バッテリー持続時間  
**45分**  
(充電時間5時間)



バッテリーレベルが低い

バッテリーが充電中  
(フル充電されると消えます)

外部電源に接続中

## ■ 吸引レベルの設定



黄色のランプは、吸引のレベルを表します



コントロールパネルの 水色の部分が推奨される吸引レベルとなります

←→ 推奨吸引レベル



## 本体セット

①



構成品  
 ・本体  
 ・キャニスター  
 ・吸引チューブ  
 (患者側/本体側)  
 ・ワイヤースタンド  
 ・AC/DCコード  
 ・吸引器用バッテリー  
 ・専用バッグ

## 消耗品

② 交換に便利な消耗品セット



③ まとめ買いに便利な6個入



④ 1本単位で  
購入可能



⑤ 1本単位で  
購入可能



⑥ 吸引器用フィルター



## オプション

⑦ バッテリー切れの際に  
外部充電可能



⑧ ⑦用コード



⑨ シガーソケット対応



⑩ より効率的にろ過するために本体側  
チューブを高性能なフィルターキットに  
交換することができます



## ●商品リスト

コード	商品名	定価	分類	通常時在庫情報
① 24-9512-00	マツヨシコンパクト吸引器セット	¥65,000	本体セット	マツヨシ在庫
② 24-9512-10	キャニスター800ml チューブセット	¥4,000	消耗品	マツヨシ在庫
③ 24-9512-11	キャニスター800ml 6個入	¥11,000	消耗品	マツヨシ在庫
④ 24-9512-12	吸引チューブ 1.8m (患者側チューブ)	¥1,000	消耗品	マツヨシ在庫
⑤ 24-9512-13	吸引チューブ(本体側チューブ)	¥900	消耗品	マツヨシ在庫
⑥ 25-3646-00	吸引器用フィルター 10個入	¥12,000	消耗品	マツヨシ在庫
⑦ 24-9512-14	吸引器用外部充電器	¥27,500	オプション	マツヨシ在庫
⑧ 24-9512-15	外部充電器用ACコード	¥10,000	オプション	マツヨシ在庫
⑨ 24-9512-16	吸引器用DCコード 12V (シガーソケット対応可能)	¥7,000	オプション	マツヨシ在庫
⑩ 24-9512-17	吸引器用フィルターキット	¥2,800	オプション	マツヨシ在庫

①-⑤、⑩: **管理**  
**クラスII**

## ●仕様: マツヨシコンパクト吸引器セット

寸法: 23.6cmx19cmx23.6cm

重さ: 1.97kg(専用バッグ含まず)

バッテリー: 充電式NiMH 12 V, 1.6 Ah

吸引圧: 最大吸引圧73+kPa

排気流量: 30 L/min

電源電圧: 交流電源/100-240 VAC  
直流電源/12 VDC

周波数: 50/60 Hz

管理医療機器(クラスII)

医療機器認証番号: 303AABZX00036A01

【販売元】

【取扱い販売店】

 **松吉医科器械株式会社**

【本社】

〒113-8520 東京都文京区湯島3-14-9 湯島ビル3F

【オフィス】

札幌・仙台・埼玉・東京・立川・横浜・名古屋・大阪  
 広島・福岡

<https://www.matsuyoshi.co.jp>

